

COPERTA ISOTERMICA



COUVERTURE DE SURVIE



RESCUE BLANKET

RETTUNGSDECKE MANTA DE RESCATE

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato

Metallized polyester film

Film polyester métallisé

Metallisierte Polyesterfolie

Film de poliester metalizado

Filme de poliéster metalizado

Folie de poliester metalizată

Metalliserad polyesterfilm

Metallisoitu polyesterikalvo

Fémbevonatú poliészter fólia

Metalizirana poliesterska folija

Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα

طبقة من البوليستر المعدن

REF 34085



LOT 000046



 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com - Made in China

 **GIMA**

www.gimaitaly.com



8 023279 340853 >

Rev. 2-01.22

IT - APPLICAZIONI Le proprietà di riflessione del materiale permettono di proteggere il corpo dai raggi solari o di evitare la dispersione del calore dal corpo. È consigliato l'uso in caso di **INCIDENTI, VENTO, PIOGGIA, LUOGHI SOLEGGIATI, ISTRUZIONI PER L'USO** Stendere la coperta sul corpo senza stringere. Lato **oro** esterno per trattenere il calore; lato **argento** esterno per riflettere i raggi solari.

ATTENZIONE - I prodotti umidi o amuffiti non devono essere utilizzati. - Esclusivamente monouso, non è consentito il riutilizzo. - Non conservare a temperature estreme. - Smaltire in modo sicuro dopo l'uso per evitare il rischio di infezione. - Segnalare qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

STOCCAGGIO E TRASPORTO - Il dispositivo deve essere conservato a un'umidità relativa inferiore all'80%, l'ambiente di stoccaggio deve essere mantenuto con gas non corrosivi, asciutto, al riparo dalla luce solare, in condizioni ben ventilate e pulite. - Il dispositivo deve essere curato durante il trasporto e la movimentazione.