



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CRANIOMETRO CRANIOMETER CRANIOMÈTRE CRANEÓMETRO

REF 70410 (27327)



METRICA S.p.A.
Via Grandi 18
20097 San Donato Milanese (MI)
Made in Italy

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



PREMESSA

Lo scopo di questo manuale è quello di fornire al cliente tutte le indicazioni possibili sul CRANIOMETRO, nonché le istruzioni d'uso e di manutenzione che permettono di mantenere nel tempo sia le prestazioni che l'efficienza del CRANIOMETRO.

Il manuale d'uso deve essere conservato in buono stato e riposto in luogo accessibile per una rapida consultazione

Il CRANIOMETRO è soggetto a possibili aggiornamenti e per questo possono essere montati particolari diversi da quelli raffigurati; questa eventualità non pregiudica in alcun modo le spiegazioni contenute nel manuale d'uso e la sicurezza del CRANIOMETRO stesso.

SCOPO DELL'APPARECCHIO

Il CRANIOMETRO è uno strumento che ha la funzione di misurare in cm, con una precisione di ± 2 mm, ed in pollici con una precisione $\pm 1/8$ ", il diametro del cranio di un neonato.


Range misurazione circonferenza cranio 0-60cm - tolleranza ± 5 mm/
graduazione in mm

Range misurazione diametro cranio 0-19 cm
(il diametro è dato dalla circonferenza / π)

ISTRUZIONI D'USO

Svolgere completamente il craniometro ed inserire la parte finale tra le aperture in corrispondenza dell'indice, tenendo quest'ultimo rivolto verso la parte esterna (vedi figura 1).

L'utilizzo del craniometro è molto semplice: applicarlo sulla testa del neonato, tirare con delicatezza il lembo sporgente fino a stringerlo attorno alla fronte; ora sarà sufficiente leggere i dati in corrispondenza della freccia indicatrice sul frontale del craniometro.

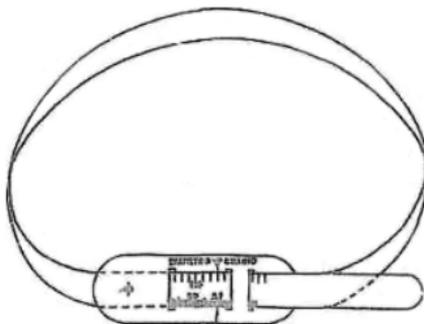

AVVERTENZE

La pulizia del CRANIOMETRO deve essere effettuata con un panno umido di sostanze che non rovinino il tessuto (es. alcool - detergente per vetri).

Il CRANIOMETRO deva essere conservato nella sua scatola in un ambiente non umido.

 REF	Codice prodotto	 LOT	Numero di lotto
	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Conservare al riparo dalla luce solare
	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Fabbricante		Leggere le istruzioni per l'uso

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.