


Suprasorb® H

Medicazione idrocolloidale

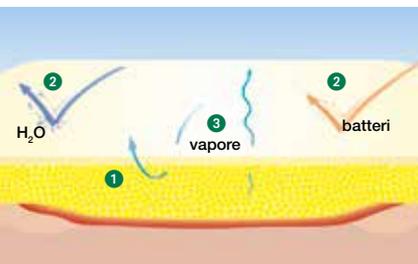

- 1 mediante assorbimento dell'essudato trasformazione in gel che riempie la lesione e trattiene essudato e detriti cellulari.
- 2 barriera contro fluidi e batteri.
- 3 evaporazione dell'umidità in eccesso.

Suprasorb® H

Medicazione idrocolloidale, sterile, confezionata singolarmente

Misura (cm)	Codice	Unità di vendita (pz.)
standard		
10 x 10	20 403	10
15 x 15	20 401	5
20 x 20	20 402	5
trasparente		
5 x 5	20 424	10
5 x 10	20 410	10
5 x 20	20 411	10
10 x 10	20 412	10
15 x 15	20 413	5
20 x 20	20 414	5
sacrum		
14 x 16	20 430	5
con bordo		
14 x 14	20 420	5

Campi di applicazione

- lesioni con essudato medio (Suprasorb H standard, sacrum, border)
- lesione con essudato debole (Suprasorb H sottile)
- lesioni superficiali
- lesioni non infette
- in tutte le fasi del processo di guarigione di lesioni come ad es.:
 - ulcere di diversa origine
 - ustioni di secondo grado
 - siti di prelievo cutaneo
 - lesioni post-operatorie

Proprietà

- guarigione ottimale grazie ad un ottimale assorbimento dell'essudato
- grande comfort grazie alla facilità d'applicazione
- particolarmente sottile e flessibile
- barriera contro batteri e liquidi
- permette l'igiene personale

Indicazioni/Avvertenze

Intervallo di cambio:

- a giudizio del personale curante, a seconda delle condizioni della lesione, del grado di essudazione e della possibile medicazione primaria, non oltre i 5-7 giorni
- nel caso in cui si formi una bolla che si sviluppa oltre l'area della lesione

Versioni

- standard
- trasparente
- sacrum
- con bordo

Suggerimento

- può essere utilizzata in combinazione con le seguenti medicazioni primarie: Suprasorb A, Suprasorb C, Suprasorb G
- Suprasorb H sottile da cm 5 x 5 è particolarmente indicato nel trattamento di lesioni del piede diabetico