


IMPORTANTE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Intermed srl non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

DESCRIZIONE

Sponda per letto universale con struttura in acciaio cromato. Possibilità di regolazione in altezza e larghezza.

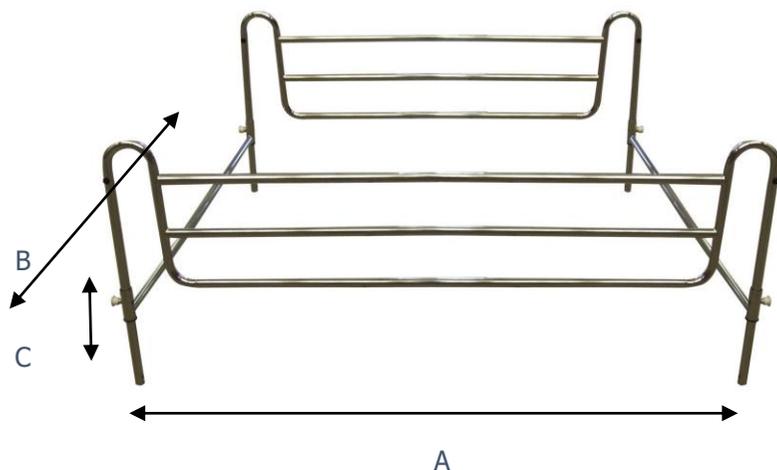

DATI TECNICI

A	Lunghezza	150 cm
B	Regolazione larghezza	da 68 a 118 e da 142 a 204 cm
C	Regolazione altezza	due posizioni per 20 cm totali

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica.

Verificare periodicamente il corretto funzionamento delle spine di bloccaggio e lo stato generale delle sponde e dei segmenti di supporto con particolare attenzione alle parti mobili ed ai punti di saldatura.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il dispositivo deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà gli eventuali adattamenti nel rispetto delle necessità di utilizzo. Tali adattamenti devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.



- Per ottenere larghezze comprese tra i 68 ed i 118 cm utilizzare i segmenti 1 e 2. Infilare il segmento 2 nel segmento 1 e regolare secondo necessità fissando tramite spine di bloccaggio. Possibilità di regolazione in 21 posizioni distanti 25 mm l'una dall'altra.
- Per ottenere larghezze comprese tra i 142 ed i 204 cm utilizzare i segmenti 1, 2 e 3. Infilare il segmento 2 nel segmento 3 ed il segmento 3 nel segmento 1 (il verso corretto di ciascun segmento è quello riprodotto in figura) e regolare secondo necessità fissando tramite spine di bloccaggio. Possibilità di regolazione in 22 posizioni sul segmento 1 e 5 posizioni sul segmento 3 distanti 25 mm l'una dall'altra.
- Posizionare i segmenti assemblati e regolati secondo necessità sotto il materasso lungo la sua larghezza ad una distanza di circa un metro e mezzo. Avere cura, nell'operazione, di mantenere verso l'alto la parte dei supporti per sponda con bordo in plastica (il verso corretto è quello riprodotto in figura).
- Infilare le sponde nei supporti e fissarle in una delle due posizioni predisposte in ragione dell'altezza del materasso e delle esigenze del paziente.

PRECAUZIONI GENERALI D'IMPIEGO

Verificare sempre, prima dell'utilizzo, il corretto posizionamento delle spine di bloccaggio. Controllare che le spine di regolazione in altezza siano ben fissate nei fori della misura desiderata.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.

GARANZIA

Tagliando da compilare a cura dell'acquirente

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Cap:

Città:

Prov.:

Telefono:

Ai sensi del Regolamento GDPR, autorizzo il trattamento dei dati personali riportati sul presente tagliando.

Firma
.....

Timbro del Punto Vendita

Strumento:

Data di acquisto:

Da inviare insieme allo strumento reso per riparazione.



ISTRUZIONI PER L'USO

Revisione 02, Febbraio 2019

SPONDA LETTO UNIVERSALE AQ-12

Made in China



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Via Ludovico d'Aragona, 11 -20132 Milano (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it