

MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE

POLTRONA RIABILITAZIONE



MODELLI POLTRONA RIABILITAZIONE

Descrizione	Codice
Poltrona per riabilitazione	134501

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisitech.com - pec : fisitech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

Indice

INTRODUZIONE	pag. 3
SICUREZZA – AVVERTENZE – GARANZIA	pag. 4
TIPO DI IMBALLO E DISIMBALLO – SMALTIMENTO	pag. 5
ETICHETTA PRODOTTO E SIMBOLI	pag. 6
DATI TECNICI – ISTRUZIONI PER L'USO	pag. 7
MANUTENZIONI – PULIZIA	pag. 8
RICAMBI E COLORI	pag. 9
REGISTRAZIONE INTERVENTI	pag. 10

INTRODUZIONE

Questo manuale ha lo scopo di fornire agli utilizzatori ed addetti le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo della poltrona, siano in grado di gestire lo stesso in autonomia e sicurezza.

Il manuale contiene informazioni inerenti all'aspetto tecnico, al funzionamento, alla manutenzione, ai ricambi ed alla sicurezza.

Il Libretto Istruzioni deve sempre seguire l'apparecchiatura e deve essere accuratamente conservato al fine di non comprometterne lo stato di leggibilità.

In caso di cessione a terzi è necessario trasmettere il presente manuale insieme agli altri documenti così come previsto dalle disposizioni inerenti alla Direttiva Europea 93/42/CEE.

Uso previsto

La poltrona riabilitazione arti è uno strumento che, usato sotto il controllo di un medico - terapeuta, permette di effettuare esercizi di riabilitazione e potenziamento degli arti superiori ed inferiori.

Dati del costruttore

FISIOTECH SRL

Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F

31028 VAZZOLA (TV) - Italia

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

info@fisitech.com

Ambiente di applicazione

I dispositivi medici oggetto del presente manuale sono conformi alla direttiva 93/42/CEE modificata dalla 2007/47/CE secondo l'allegato VII. Ambiente di applicazione: cure ambulatoriali somministrate in ospedale o altro centro medico, sotto la sorveglianza medica, nelle quali gli apparecchi EM sono previsti per la necessità di persone ammalate, che hanno subito lesioni o sono portatrici di disabilità, per il trattamento, diagnosi e monitoraggio.

Immagazzinaggio

L'apparecchiatura non richiede particolari condizioni ambientali. Deve essere utilizzata all'interno di un edificio con temperatura ammesse da 5° a 40°C e con umidità compresa tra 10% e 80%.



ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il lettino.

FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme del lettino o fatto da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.

SICUREZZA



ATTENZIONE! La poltrona non deve essere utilizzata:

- Con un carico di funzionamento in sicurezza superiore a quello dichiarato.
- In condizioni di scarsa stabilità e/o in prossimità di dislivelli (es.: pendenze, gradini, ecc.).
- Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.
- Senza la supervisione di un terapeuta.
- Senza prescrizione di uno specialista.
- Esposta alle intemperie.



ATTENZIONE!

- Tenersi ad adeguata distanza dalle parti meccaniche in movimento durante lo svolgimento della terapia.
- Regolazioni e tarature vanno eseguite a macchina ferma.
- Serrare bene tutti i volantini prima dell'uso.
- Trasportare l'apparecchiatura sempre in due persone afferrandola per le gambe.
- Non sedersi sullo schienale.
- L'asse di rotazione del braccio oscillante deve essere in linea con quello dell'arto in trattamento durante l'uso.

AVVERTENZE

- Le gomme espanse e le parti plastiche dell'apparecchiatura possono incendiarsi se messe in contatto con fiamme libere.
- Le lampade terapeutiche irradianti possono danneggiare il rivestimento delle imbottiture.
- Prodotti detergenti corrosivi e/o abrasivi possono danneggiare il rivestimento delle imbottiture.

GARANZIA

La poltrona per riabilitazione arti gode di una garanzia che copre solamente i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia non copre: i materiali di consumo e quelli di normale usura quali: imbottiti, i guasti causati da urti e/o cadute, l'errato o improprio uso, l'uso da parte di personale non qualificato. Qualora l'apparecchiatura risulti manomessa la garanzia decade automaticamente. Le riparazioni in garanzia si intendono presso nostra sede operativa e previa autorizzazione. Il materiale da riparare in garanzia ci dovrà pervenire in porto franco e con imballo originale. Per la riparazione oltre alla richiesta scritta ci dovrà pervenire copia della fattura e del documento di trasporto.

TIPO DI IMBALLO

L'imballo è costituito da una scatola di cartone. Viene chiusa da graffette in ferro e la scatola viene posizionata su un pallet (bancale) costruito appositamente per questo tipo di scatola. La scatola è fissata al bancale con reggette di plastica.



ATTENZIONE! L'apparecchiatura è pesante (circa Kg 85) e soprattutto ingombrante. Dimensioni imballo: lunghezza cm 120 x larghezza cm 80 x altezza cm 93. Deve essere movimentato con estrema cautela. Lo scarico deve avvenire o con attrezzature adatte per lo scarico (carrello elevatore) oppure da almeno 3/4 persone.

DISIMBALLO

Dopo aver depositato in luogo idoneo il pallet (bancale) contenente il lettino, tagliare le reggette di plastica che collegano il pallet (bancale) al lettino e che chiudono il cartone.



ATTENZIONE! Fare molta attenzione per evitare tagli alle mani per uso incauto di cutters o forbici o altri attrezzi usati per il taglio. Si consiglia di utilizzare forbici con punte arrotondate per evitare danni alle mani e all'imbottitura del lettino. Conservare l'imballo per un'eventuale restituzione al costruttore. Smaltire reggette, pluriball e cartone come materiale di riciclaggio.

SMALTIMENTO



La presenza di questo simbolo su un prodotto indica che esso non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma raccolto a parte per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge.



ATTENZIONE! Il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata." Significa che non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma va quindi raccolto per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge portandolo o depositandolo presso i centri di raccolta differenziata predisposti dalle varie amministrazioni locali.

ETICHETTA PRODOTTO – SIMBOLI UTILIZZATI



	Fabbricante
	Codice Articolo
	Numero di matricola
	Data di fabbricazione
	Portata max
	Attenzione
	Limite di temperatura
	Limite di umidità
	Tenere lontano dalla luce solare e da fonti di calore
	Tenere al riparo dalla pioggia
	Leggere le istruzioni
	La presenza di questo simbolo su un prodotto indica che esso non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma raccolto a parte per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge.

DATI TECNICI

- Altezza fissa 70 cm.
- Altezza max schienale 150 cm.
- Dimensioni cm 150 X 60 X 70 -150 h.
- Regolazione dello schienale da 0° a + 85° mediante molla a gas.
- Piedini regolabili.
- Pesi inclusi 14 kg.
- Braccio oscillante graduato, posizionabile in entrambi i lati.
- Regolazione angolo di lavoro.
- Cuscini di regolazione seduta.
- Portata massima statica Kg 130 uniformemente distribuiti.
- Struttura in acciaio verniciato con parti scorrevoli zinco-cromate.
- Imbottitura in poliuretano espanso densità 30 kg/m³ ignifuga classe 1 IM spessore 4 cm.
- Rivestimento in similpelle ignifuga classe 1 IM.

ISTRUZIONI D'USO

Eseguire le operazioni nel seguente ordine:

- Estrarre l'apparecchiatura, le dotazioni dall'imballo e trasferirle nel luogo d'uso.
- Assicurarsi che l'apparecchiatura sia in situazione di buona stabilità.
- Infilare il braccio oscillante nell'apposita predisposizione laterale Dx o Sx a seconda dell'arto da trattare. Serrare quindi il volantino regolazione altezza (per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura il centro di rotazione del braccio arto deve corrispondere con quello dell'arto da trattare).
- Regolare la posizione dello schienale nella posizione desiderata agendo sulla leva di blocco della molla a gas di regolazione posta nel retro della sedia; con lo schienale totalmente reclinato è possibile eseguire esercizi in posizione prona.
- Regolare il posizionamento e l'angolazione del braccio oscillante in funzione dell'esercizio e delle prescrizioni del medico - terapeuta:
 - a) Tirare il blocco verso il braccio arto.
 - b) Regolare l'angolazione di "andata" ruotando la ghiera fino al punto desiderato e spingere il blocco verso la ghiera di una posizione.
 - c) Regolare l'angolazione di "ritorno" ruotando la ghiera fino al punto desiderato e spingere il blocco verso la ghiera fino a finecorsa.
 - d) Se del caso regolare la posizione del braccio pesi svincolandolo dal braccio arto tramite il volantino a molla di regolazione posizione.
- Applicare gli appositi dischi di carico, in funzione dell'esercizio e delle prescrizioni del medico - terapeuta, al braccio pesi e assicurarli con l'apposito stringi tubo (i dischi peso in eccesso possono essere posizionati negli appositi porta peso situati sulle gambe posteriori dell'apparecchiatura).
- Vincolare le cosce alla seduta abbassando con l'apposito ferma cosce e l'arto al braccio arto con l'apposita cinghia.
- Eseguire il trattamento

MANUTENZIONI

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati, elettricisti o persone con conoscenza del contenuto del presente libretto istruzioni.

Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione critica come ad esempio caduta, urti violenti, versamento di liquidi, ecc. ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.



ATTENZIONE!

- In evidenza di pericolo per la sicurezza, il dispositivo deve essere immediatamente disattivato senza possibilità di utilizzo finché il pericolo non sia stato eliminato.

MANUTENZIONI	COME FARE
Parti meccaniche	Controllare ogni 3 mesi circa, o dopo un uso particolarmente intenso, il serraggio di viti e bulloni, verifica giochi delle boccole e perni; assenza di lesioni e deformazioni strutturali.

PULIZIA

Si consiglia per la disinfezione delle mani o delle parti del corpo che entrano in contatto col paziente o con altre superfici l'utilizzo di prodotti disinfettanti per uso esterno

Pulizia dell'imbottitura: Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare evitando l'esposizione diretta alla luce del sole.

Pulizia della parte metallica verniciata: Spolverare con un panno non abrasivo asciutto o al massimo appena inumidito con po' di acqua.



ATTENZIONE!

1. Prodotti aggressivi possono danneggiare le superfici.
2. Prima di riutilizzare l'apparecchiatura dopo la pulizia verificare che tutti i componenti siano perfettamente asciutti.
3. I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE
GAP4000001	Molla a gas schienale

I NOSTRI COLORI

	DESCRIZIONE
Struttura in metallo	Panna RAL 9001 bucciato
Imbottitura	Blu

[illegible]