

MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE

DISPOSITIVO PER TRAZIONE A COLONNA



MODELLI TRAZIONE A COLONNA

Descrizione	Codice
Dispositivo per trazione a colonna	136012
Dispositivo per trazione a colonna per unità trazione	136013

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@mailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

Indice

INTRODUZIONE	pag. 3
SICUREZZA – GARANZIA – DISIMBALLO – SMALTIMENTO	pag. 4
CARATTERISTICHE TECNICHE – IN DOTAZIONE	pag. 5
INSTALLAZIONE – MODALITÀ D’USO	pag. 6
AVVERTENZE – MANUTENZIONI – PULIZIA	pag. 7
ACCESSORI	pag. 8
REGISTRAZIONE INTERVENTI	pag. 9

INTRODUZIONE

Questo manuale ha lo scopo di fornire agli utilizzatori ed addetti le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo delle parallele, siano in grado di gestirle in autonomia e sicurezza.

Il manuale contiene informazioni inerenti all'aspetto tecnico, al funzionamento, alla manutenzione, ai ricambi ed alla sicurezza.

Il Libretto Istruzioni deve sempre seguire l'apparecchiatura e deve essere accuratamente conservato al fine di non comprometterne lo stato di leggibilità.

In caso di cessione a terzi è necessario trasmettere il presente manuale insieme agli altri documenti così come previsto dalle disposizioni inerenti alla Direttiva Europea 93/42/CEE.

Uso previsto

Dispositivo mobile a colonna per le trazioni cervicali destinato agli ambulatori specialistici. Il dispositivo viene fornito completo di: fune, archetto per mentoniera, mentoniera in similpelle e porta dischi per effettuare le trazioni.

Dati del costruttore

FISIOTECH SRL

Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F

31028 VAZZOLA (TV) - Italia

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

info@fisiotech.com

Immagazzinaggio

In caso di immagazzinamento si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali: umidità relativa 10% ÷ 90 % - temperatura -10°C ÷ +50°C. Luogo pulito.



ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il lettino.

FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme del dispositivo o fatto da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.

SICUREZZA



ATTENZIONE!

- L'idoneità del trattamento e dell'apparecchiatura deve essere prescritta al paziente da uno specialista.
- Il trattamento deve essere eseguito sotto continua sorveglianza di uno specialista.
- Per maggior igiene proteggere la mentoniera con lenzuolino di carta.



ATTENZIONE! IL DISPOSITIVO NON DEVE ESSERE USATO:

- Con carichi superiori a quanto stabilito dal costruttore.
- In condizioni di scarsa stabilità.
- Senza aver effettuato il corretto assemblaggio, ancoraggio e collaudo.
- Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.
- In configurazione impropria o quando ci sia il sospetto che possa arrecare danno al paziente.
- Da bambini e minori non sorvegliati.
- Quando l'uso dell'apparecchiatura è controindicato o genera gravi disagi al paziente.
- Senza prescrizione del trattamento da parte di uno specialista.
- In ambiente esposto alle intemperie.



ATTENZIONE!

L'installazione deve essere effettuata da un tecnico competente che abbia consultato il presente manuale, oltre ad aver accertato l'idoneità del locale.

Valutare i possibili pericoli derivanti dall'associazione di altre apparecchiature alla struttura (Esempio: pesi aggiuntivi, connessioni elettriche, lettino per terapia regolabile in altezza con traslazione laterale, ecc.)

GARANZIA

Il dispositivo per trazioni a parete gode di una garanzia che copre solamente i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia non copre: i materiali di consumo e quelli di normale usura quali: corda/fine, maniglia, mentoniera i guasti causati da urti e/o cadute, l'errato o improprio uso, l'uso da parte di personale non qualificato. Qualora l'apparecchiatura risulti manomessa la garanzia decade automaticamente. Le riparazioni in garanzia si intendono presso nostra sede operativa e previa autorizzazione. Il materiale da riparare in garanzia ci dovrà pervenire in porto franco e con imballo originale. Per la riparazione oltre alla richiesta scritta ci dovrà pervenire copia della fattura e del documento di trasporto.

DISIMBALLO

Dopo aver depositato in luogo idoneo tutto il contenuto dell'imballo si potrà procedere con l'installazione.



ATTENZIONE! Fare molta attenzione per evitare tagli alle mani per uso incauto di cutters o forbici o altri attrezzi usati per il taglio. Si consiglia di utilizzare forbici con punte arrotondate per evitare danni alle mani e all'attrezzatura. Conservare l'imballo per un'eventuale restituzione al costruttore. Smaltire reggette, pluriball e cartone come materiale di riciclaggio.

SMALTIMENTO



La presenza di questo simbolo su un prodotto indica che esso non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma raccolto a parte per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge.



ATTENZIONE! Il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta separata.” Significa che non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma va quindi raccolto per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge portandolo o depositandolo presso i centri di raccolta differenziata predisposti dalle varie amministrazioni locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice articolo	136012
------------------------	---------------

Dispositivo regolabile in altezza per trazione cervicale con carico variabile.
Struttura in acciaio verniciato con parti scorrevoli cromate.
Carico di lavoro regolabile con pesi da 1 kg per un peso massimo di 5 kg.



Codice articolo	136013
------------------------	---------------

Dispositivo regolabile in altezza per trazione cervicale con carico variabile.
Struttura in acciaio verniciato con parti scorrevoli cromate predisposto per unità trazione (non compresa).
Carico di lavoro regolabile con pesi da 1 kg per un peso massimo di 5 kg.



Larghezza	62 cm
Lunghezza	62 cm
Altezza regolabile	da 150 a 225 cm



ATTENZIONE! Prima di procedere all'uso del dispositivo assicurarsi:


- dell'idoneità strutturale
- dell'idoneità dell'ambiente
- dell'adeguatezza dello spazio a disposizione.

MATERIALE IN DOTAZIONE

- No. 5 mt di funicella in nylon 5 mm
- No. 1 moschettone
- No. 2 carrucola
- No. 1 archetto per mentoniera
- No. 1 mentoniera in similpelle

MODALITÀ D'USO

1. Inserire i pesi desiderati in base al tipo di esercizio scelto, nell'apposito carrello porta pesi (posizione A).
2. Collegare la mentoniera all'archetto (posizione B).

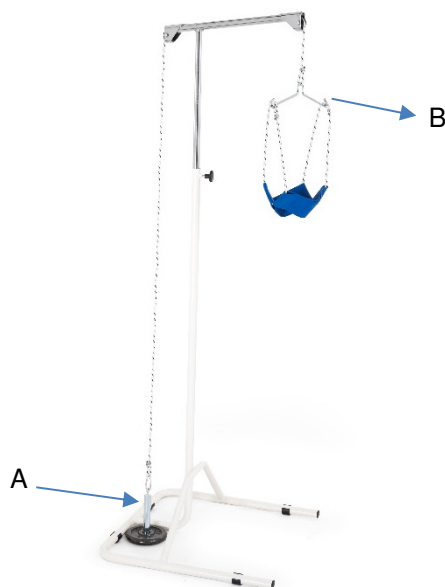

ATTENZIONE!

- I PESI DEVONO ESSERE AGGIUNTI E TOLTI GRADUALMENTE SENZA GENERARE CONTRACOLPI AL PAZIENTE.
- LE STRUTTURE SONO STATE PROGETTATE, COLLAUDATE E COSTRUITE PER SOPPORTARE IN SICUREZZA I CARICHI DELLE PORTATE DICHIARATE.

AVVERTENZE

 **ATTENZIONE!** L'operatore non deve mai lasciare il paziente incustodito. Il costruttore non risponde per danni a persone e/o cose causate dall'uso del dispositivo da parte di personale negligente e/o non qualificato.

MANUTENZIONI

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati, elettricisti o persone con conoscenza del contenuto del presente libretto istruzioni.

Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione critica come ad esempio caduta, urti violenti, versamento di liquidi, ecc. ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.

 **ATTENZIONE!**

In evidenza di pericolo per la sicurezza, il dispositivo deve essere immediatamente disattivato senza possibilità di utilizzo finché il pericolo non sia stato eliminato.

MANUTENZIONI	COME FARE
Il dispositivo per trazioni a parete non ha bisogno di particolari manutenzioni, ma si raccomanda di:	Almeno ogni 6 mesi verificare la funzionalità di tutti i componenti ed accessori del dispositivo. Verificare viti, bulloni, lo stato di usura e che non ci siano lesioni o deformazioni del dispositivo e dei suoi accessori. Verificare che il dispositivo sia ben ancorato al muro.

PULIZIA

PULIZIA STRUTTURA METALLICA: spolverare con un panno non abrasivo asciutto o al massimo appena inumidito con po' di acqua e asciugare con cura.

PULIZIA MENTONIERA: Per maggior igiene proteggere la mentoniera con lenzuolino di carta. Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare **evitando** l'esposizione diretta alla luce del sole.

OPTIONAL SU RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE
136021	Mentoniera in testa di moro
136041	Dischi in ghisa verniciato con foro Ø 25 al kg.
136052	Cavigliera con gancio colore nero. Imbottita. Rivestimento esterno in similpelle con anello passante in acciaio cromato.
136031	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 0,5
136032	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 1
136033	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 2
136034	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 3
136035	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 4
136036	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 5

[illegible]