

# GluNEO<sup>®</sup> plus<sup>+</sup>

## GLUCOMETRO E STRISCE REATTIVE

Istruzioni per l'uso



## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il Kit per l'autocontrollo della glicemia GluNEO® plus. Questo manuale contiene ogni informazione sull'utilizzo del sistema. Leggetelo attentamente prima dell'uso.

Consultate sempre il Vostro medico curante prima di intraprendere eventuali nuove azioni terapeutiche. Il dispositivo è destinato solo ad un uso diagnostico in-vitro.

### Informazioni importanti

Il sistema per l'autocontrollo della glicemia GluNEO® plus può essere utilizzato su campione di sangue fresco intero capillare o venoso.

I risultati dei test non dovrebbero essere utilizzati per la diagnosi del diabete. Consultate sempre il Vostro medico curante o diabetologo in merito alle modalità di gestione quotidiana della Vostra patologia diabetica. Vi raccomandiamo, altresì, di tenere lontano il kit dalla portata dei bambini per la presenza di piccoli componenti potenzialmente molto pericolosi se maneggiati da bambini.

### Principio di misura

La striscia reattiva rappresenta il Bio-Sensore nella cui area reattiva è presente l'enzima FAD-GDH il quale, a contatto con il glucosio contenuto nel campione di sangue, reagisce chimicamente producendo corrente elettrica che, percorrendo gli elettrodi presenti nella striscia, raggiunge il circuito elettronico del glucometro. Questo, in funzione del quantitativo di corrente elettrica, effettua delle elaborazioni interne ed infine, dopo pochi secondi, mostra il risultato del test a display come quantità di glucosio (in mg/dl) presente nel sangue del paziente. Tale metodologia di misura è chiamata amperometrica proprio perchè si basa sulla corrente elettrica.

### Avvertimenti e precauzioni

Tutti i componenti del Kit sono a potenziale rischio di contaminazione biologica. Utilizzare sempre lancette pungidito nuove e non condividerle mai con altri individui. Consultare sempre il vostro diabetologo prima di effettuare ogni qualsivoglia cambiamento terapeutico basandosi sui risultati dei test effettuati.

- Non cercate di disassemblare il glucometro
- Non esporre direttamente ai raggi solari
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non pulire utilizzando liquidi.

## INDICE

Contenuto del Kit e Installazione Batteria	4
Il Glucometro e la penna pungidito	5
Il display	6
La striscia reattiva	7
Prima di effettuare il test	
Configurazione	8-9
La funzione di auto codifica	10
La soluzione di controllo	11-12
Il test	
Test con sangue dai polpastrelli	13-14-15-16
Il tasto di espulsione della striscia	17
La funzione memoria	
Rivedere i risultati dei test	18-19
Il test da siti alternativi	
Il prelievo del campione di sangue da siti alternativi	20-21
Connessione al PC	22
Messaggi d'Errore	23-24
Risoluzione dei problemi	25
Caratteristiche tecniche	26
Significato dei simboli	27

## Contenuto del Kit GluNEO® plus





1. Glucometro
2. Strisce reattive
3. Penna pungito
4. Lancette pungidito
5. Istruzioni per l'uso
6. Garanzia
7. Custodia
8. Diario delle misure
9. Batteria (CR2032) da 3V

## Installazione della Batteria


Il glucometro GluNEO® plus utilizza una batteria "a bottone" di tipo CR2032 da 3V.  
Installare una batteria nuova la prima volta che si utilizza il glucometro e, successivamente, ogniqualvolta vi appare il simbolo  che indica batteria quasi scarica.



## Descrizione del Glucometro e della Penna pungidito

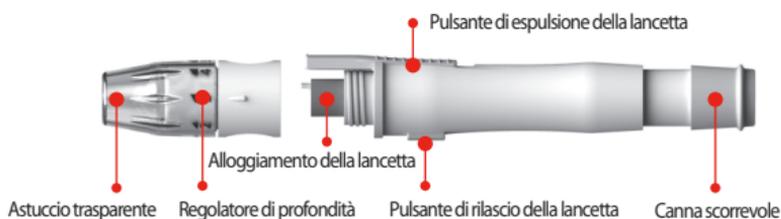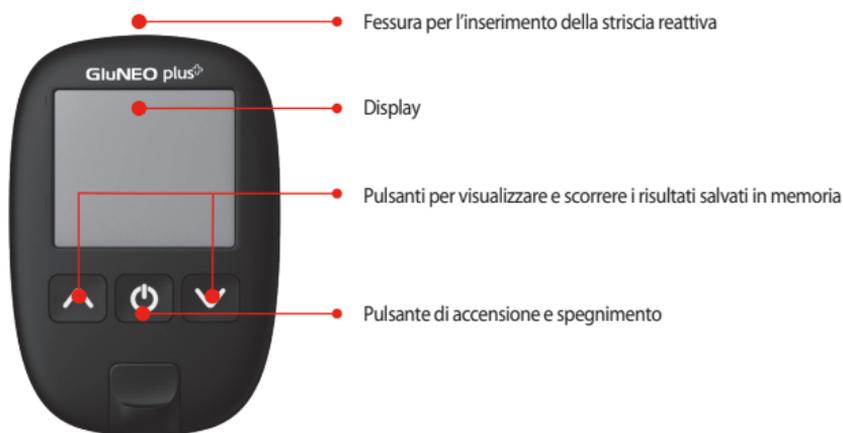

## I SIMBOLI DEL DISPLAY

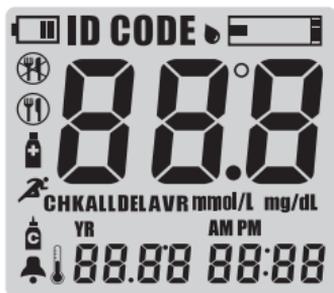

-  Batteria quasi scarica
-  Allarme
- CHK** Controllo del glucometro
- ALL DEL** Cancellazione di tutti i risultati in memoria
- AVR** Media di risultati
-  Prima dei pasti
-  Dopo i pasti
-  Dopo aver assunto le medicine
-  Dopo l'attività sportiva
-  Simbolo della soluzione di controllo
-  Applicare la goccia di sangue
- ID** Identificativo utente
- CODE** Codice della striscia inserita
- mg/dL** Unità di misura
- YR**  **DATE**  
88.88 Temperatura / Data
- AMPN**  
88:88 Ora

## La striscia reattiva GluNEO® plus



### AVVERTENZE


- Conservare le strisce in un luogo fresco e asciutto lontano dai raggi solari. Non congelare
- Conservare le strisce solo nel loro flaconcino originale senza mischiarle con altre strisce.
- Richiudere immediatamente ed ermeticamente il flaconcino subito dopo aver estratto la striscia.
- Annotate sempre la data di scadenza ogniqualvolta aprite un nuovo flacone di strisce. La scadenza è 6 mesi dopo l'apertura del flaconcino, se inferiore a quella di fabbrica. L'utilizzo di strisce scadute può causare risultati errati delle misure
- Non effettuare il test se la temperatura esterna è minore di 10°C o maggiore di 40°C.
- Non effettuare il test se l'umidità esterna è inferiore a 10% o maggiore di 90%.
- Non esporre la striscia a contatto con sporcizia, acqua e maneggiare con mani pulite ed asciutte.

## Configurazione del glucometro




Accensione

Premere  per almeno 3 secondi

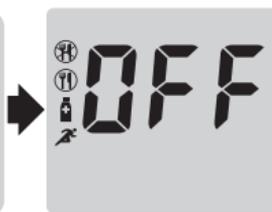

Opzione Attività Utente

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per abilitare o disabilitare l'opzione attività utente premere  per confermare.

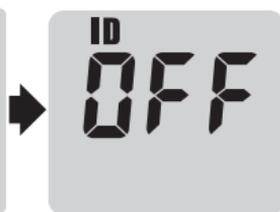

Opzione Identificativo Utente

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per abilitare o disabilitare l'opzione identificativo utente premere  per confermare.



Anno

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per regolare l'anno premere  per confermare.



Data / Ora


Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per regolare l'anno premere  per confermare.

## Configurazione del glucometro



Unità di misura della temperatura

Utilizzare i tasti ▲ e ▼  
per selezionare °C o °F e  
premere  per confermare.

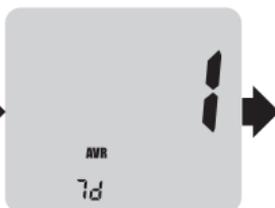


Numero di giorni per la media

Utilizzare i tasti ▲ e ▼  
per selezionare il numero di giorni  
per il calcolo della media. Sono  
possibili 3 differenti opzioni.  
Premere  per confermare.



Allarmi on / off

Utilizzare i tasti ▲ e ▼  
per abilitare (on) o disabilitare (off)  
gli allarmi. E' possibile inserire fino  
a 5 allarmi.  
Premere  per confermare.

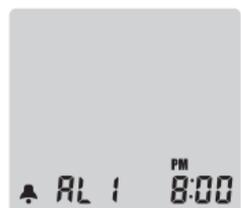

Impostazione orario allarme


Utilizzare i tasti ▲ e ▼  
per regolare l'ora ed i minuti.  
Premere  per confermare.



Allarme successivo

Procedere come per l'allarme  
precedente. E' possibile inserire  
fino a 5 diversi allarmi.  
Premere  per confermare.

## Funzione di Autocodifica

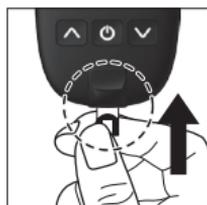

1. Il glucometro GluNEO® plus riconosce automaticamente il codice della striscia reattiva, quindi non è necessaria alcuna codifica da parte dell'operatore.




2. Ad esempio se il codice delle strisce è 125, dopo aver inserito la striscia reattiva, appare il numero 125 sul display e, tale numero è lo stesso riportato sulla confezione da dove è stata prelevata la striscia.

## La Soluzione di Controllo

La soluzione di controllo GluNEO® plus contiene una quantità nota di glucosio che reagisce con la striscia reattiva e il risultato viene visualizzato a display. L'operatore o il paziente deve verificare se tale risultato ricade all'interno dell'intervallo di valori riportato sul flaconcino contenente la striscia reattiva utilizzata per effettuare il test con la soluzione di controllo. Se ricade all'interno dell'intervallo allora significa che il sistema funziona correttamente altrimenti vorrà dire che è possibile che vi sia un qualche malfunzionamento. In tal caso contattate il vostro medico o rivenditore. E' importante effettuare periodicamente il test con la soluzione di controllo al fine di controllare il corretto funzionamento del sistema.

Inoltre, il test con la soluzione di controllo deve sempre essere effettuato nei seguenti casi:

- Quando si utilizza una nuova confezione di strisce.
- Quando avete il sospetto che il glucometro o la striscia, non stiano funzionando correttamente.
- Quando i risultati delle misure non sono plausibili considerato il vostro stato di salute e la sintomatologia.
- Se il glucometro ha subito forti urti.

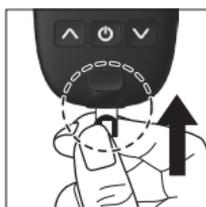

Inserire la striscia nell'apposita fessura come indicato in figura



Il glucometro visualizza il codice della striscia inserita il quale è lo stesso riportato nel barattolino da dove è stata prelevata



Premere il tasto ▲ oppure ▼ fino a quando non appare l'icona, mostrata in figura, della soluzione di controllo.  
Premere (⏻) per confermare

## La Soluzione di Controllo




1. Controllare la data di scadenza della soluzione di controllo prima di effettuare il test. La data di scadenza è riportata nel flaconcino.  
Attenzione: non utilizzare soluzioni di controllo scadute



2. Agitare la soluzione di controllo prima dell'uso



3. Scartare la prima gocciolina di soluzione di controllo al fine di eliminare la presenza di eventuali residui. Versare una gocciolina di soluzione di controllo su una superficie pulita e liscia come ad esempio la punta del tappo dello stesso flaconcino di strisce o della soluzione

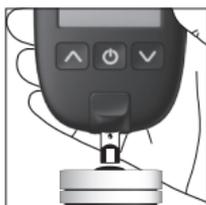


4. Appoggiare l'estremità della striscia reattiva alla gocciolina di soluzione di controllo per consentirne l'aspirazione all'interno dell'area reattiva.  
Dopo circa 5 secondi leggete il risultato del test. Se ricade all'interno dell'intervallo di valori riportato nella confezione contenente la striscia utilizzata, allora vorrà dire che il sistema funziona correttamente.


## Come effettuare il test utilizzando sangue dai polpastrelli

### Fase 1 : come ottenere un campione di sangue dai polpastrelli


Prima di effettuare la puntura, lavare bene le mani con sapone ed acqua calda ed asciugare per bene.

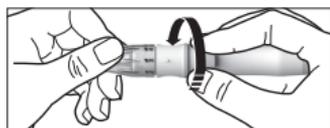


1. Rimuovere l'astuccio della penna pungidito ruotando e tirando come mostrato in figura.

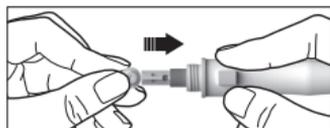

2. Inserire una lancetta pungidito nuova nell'apposito alloggiamento, come mostrato in figura.

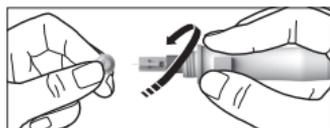

3. Rimuovere il cappuccio protettivo dell'ago ruotando e tirando, come mostrato in figura.

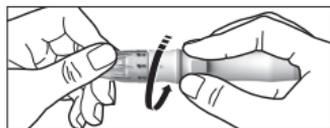


4. Rimettere l'astuccio inserendolo e ruotandolo, come mostrato in figura.



5. Regolare la profondità di penetrazione dell'ago selezionando 1 o 2 per pelle sottile delicata, 3 per pelle di spessore medio e un pò callosa, 4 o 5 per pelle spessa e callosa.




6. Caricare la penna afferrandola dalle due estremità e tirando nei versi opposti, come mostrato in figura.

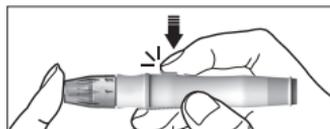

7. Appoggiare la penna al polpastrello e premere il pulsante, come mostrato in figura.

## Come effettuare il test utilizzando sangue dai polpastrelli

### Fase 2: modalità di utilizzo del Glucometro e della Striscia reattiva

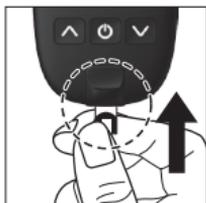

1. Inserire la striscia reattiva all'interno dell'apposita fessura del glucometro, come mostrato in figura.



2. Inserita la striscia, il glucometro automaticamente si accende e visualizza il codice della striscia che state utilizzando. Tale codice è lo stesso riportato nel barattolino da cui avete prelevato la striscia in uso.




3. Quando in alto a destra appare una gocciolina lampeggiante accanto ad una striscia reattiva, potete applicare il campione di sangue fuoriuscito in seguito alla puntura effettuata sul vostro polpastrello. Attenzione: se applicate il campione di sangue prima che la gocciolina lampeggi, il test non viene eseguito ed appare il messaggio d'errore Er5

## Come effettuare il test utilizzando sangue dai polpastrelli

Fase : modalità di utilizzo del Glucometro e della Striscia reattiva

Corretto.  
Il sangue viene aspirato dalla striscia

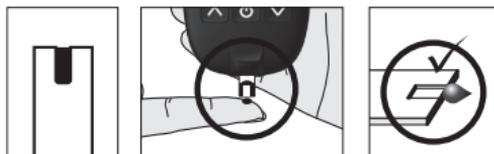

Il campione di sangue non deve essere versato sopra la striscia poichè non ne consentirebbe il totale riempimento come si vede dalla figura sottoriportata.

Errato.  
Il sangue non deve essere versato sopra la striscia.




Il campione di sangue richiesto è di 0.5 µl.

Quando il quantitativo di sangue aspirato raggiunge 0.5µl avvertirete un beep e inizia il conto alla rovescia .

Dopo 5 secondi si ottiene il risultato del test.

ATTENZIONE:

- se il conto alla rovescia non inizia, rimuovere la striscia e ripetere il test con una striscia nuova
- se non applicate il campione di sangue entro 3 minuti, il glucometro si spegne e dovete ripetere il test sin dall'inizio.

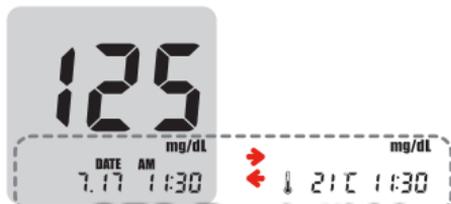

## Come correlare il risultato del test al tipo di attività in corso



Se in fase di set up avete abilitato l'opzione "Attività del paziente", allora utilizzare i tasti ▲ o ▼ per selezionare il tipo di attività (🏃, 🏊, 🏋️, 🚴) che si sta effettuando al momento del test. Infine premere e rilasciare il tasto ⏻ per confermare e spegnere il glucometro.

## Come correlare il risultato del test all'utente / paziente




Se in fase di set up avete abilitato l'opzione "Identificativo utente ID", allora utilizzare i tasti ▲ o ▼ per selezionare l'utente o paziente che sta effettuando il test. Infine premere e rilasciare il tasto ⏻ per confermare e spegnere il glucometro.

## Espulsione e smaltimento della striscia e della lancetta




1. Utilizzare l'apposito pulsante di espulsione posto sulla parte posteriore del glucometro dietro l'alloggiamento della striscia

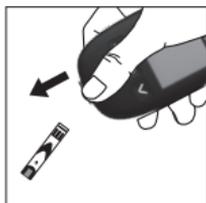

2. Rivolgere il glucometro in modo tale che la striscia cada all'interno dell'apposito contenitore idoneo allo smaltimento di tali tipologie di rifiuti, al fine di evitare ogni possibile rischio di contaminazione biologica.

### Espulsione e smaltimento della lancetta pungidito

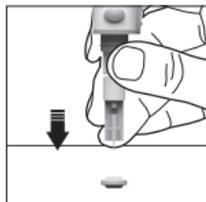

1. Inserire l'ago che fuoriesce dalla lancetta usata, completamente all'interno del cappuccio protettivo che era stato rimosso in fase di utilizzo della lancetta. Fare riferimento alla figura accanto



2. Rivolgere la penna pungidito in modo tale che la striscia cada all'interno dell'apposito contenitore idoneo allo smaltimento di tali tipologie di rifiuti, al fine di evitare ogni possibile rischio di contaminazione biologica.

Afferrare la penna pungidito dalle estremità e tirare rapidamente da entrambi i lati nei versi opposti, come mostrato in figura accanto.

## Come rivedere i risultati registrati in memoria

E' possibile visualizzare gli ultimi 365 test effettuati oltre alla media degli ultimi giorni in accordo ai valori che avete scelto in fase di impostazione del glucometro (paragrafo Configurazione del glucometro)


Come rivedere i risultati delle misure effettuate:



Premere il tasto  per richiamare il risultato dell'ultimo test che avete effettuato. Utilizzare il tasto  per visualizzare, in sequenza, i risultati dei test precedenti in ordine di data.




Utilizzare il tasto  per visualizzare le medie dei risultati delle misure precedenti

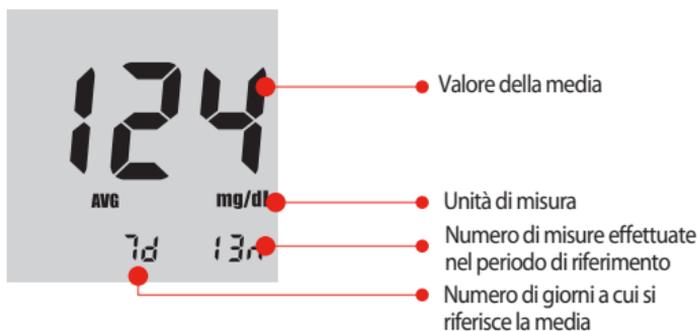

## Come rivedere i risultati registrati in memoria

Come rivedere i risultati in memoria nel caso in cui sia stata abilitata l'opzione Identificativo utente ID.

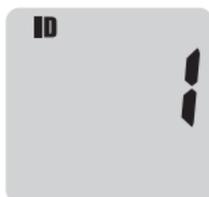

1. Dopo aver premuto e rilasciato il tasto  utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare l'identificativo utente ID desiderato.



2. I risultati delle misure visualizzati si riferiscono solo all'ID selezionato.

Come eliminare i risultati dalla memoria




1. Per eliminare un singolo risultato dalla memoria, premere contemporaneamente i tasti ▲ o ▼ per 3 secondi. Il simbolo **DEL** inizierà a lampeggiare. Un segnale acustico (beep) confermerà l'avvenuta cancellazione del risultato dalla memoria.



2. Per eliminare tutti i risultati dalla memoria, premere contemporaneamente i tasti ▲ e ▼ per 3 secondi. I simboli **ALL DEL** inizieranno a lampeggiare. Un segnale acustico (beep) confermerà l'avvenuta cancellazione di tutto il contenuto della memoria.

ATTENZIONE: una volta eliminato un risultato non può più essere recuperato

## Il prelievo da Siti Alternativi

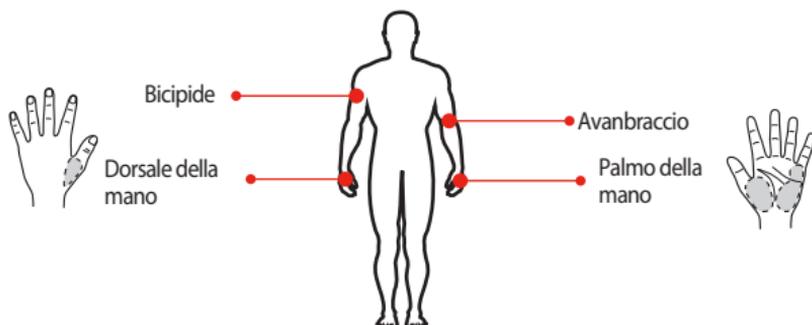


E' possibile effettuare il prelievo del campione di sangue necessario per il test, oltre che dai polpastrelli, anche da altre aree del corpo come la dorsale e il palmo della mano, i bicipidi e gli avambracci.

### AVVERTENZE:

- I risultati ottenuti utilizzando campioni presi da siti alternativi possono differire sensibilmente da quelli prelevati dai polpastrelli. Ciò capita con una maggiore probabilità quando i livelli di glucosio cambiano rapidamente ovvero dopo i pasti, dopo aver assunto una dose di insulina o dopo un'attività fisica. I campioni prelevati dai polpastrelli mostrano questi cambiamenti più fedelmente di quelli prelevati dai siti di test alternativi, pertanto, in concomitanza degli eventi sopra riportati è preferibile non utilizzare campioni prelevati da siti di test alternativi.
- Se il livello di glucosio scende, eseguire il test con campioni prelevati dai polpastrelli può identificare uno stato ipoglicemico (livello basso di zucchero nel sangue) più efficacemente dei test effettuati su campioni prelevati da siti alternativi.
- Utilizzare i siti di test alternativi solo due o più ore prima del pasto, dell'assunzione della dose di insulina o di una attività fisica. In generale ogni volta che si avverte un cambiamento rapido del livello di glucosio nel sangue è consigliabile eseguire il test su campioni prelevati dai polpastrelli, poiché ciò assicura una maggiore accuratezza.
- È consigliabile utilizzare campioni estratti dai polpastrelli se si ha il sospetto di ipoglicemia (reazione insulinica) o in particolare se si soffre di ipoglicemia asintomatica (mancanza di sintomi nell'indicare una reazione insulinica), poiché il test effettuato sull'avambraccio potrebbe non essere sufficientemente accurato nel determinare uno stato di ipoglicemia.
- I risultati derivati da campioni estratti da siti di test alternativi non vanno utilizzati nella calibrazione di sistemi di controllo continuo della glicemia e holter glicemici.
- I risultati derivati da campioni estratti da siti di test alternativi non vanno utilizzati per il calcolo delle dosi di insulina.


## Il prelievo da Siti Alternativi

### Dorsale della mano / Palmo della mano


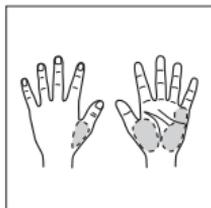


Scegliere il sito alternativo dove effettuare la puntura lontano dal passaggio di eventuali vene visibili poichè ciò potrebbe provocare una notevole fuoriuscita di sangue. Fate altresì attenzione a non pungere in prossimità dell'osso o di calli. Massaggiare delicatamente per favorire la fuoriuscita del campione di sangue.


### Avanbraccio

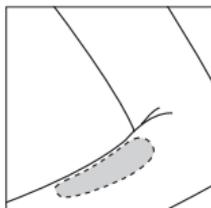

### Bicipide

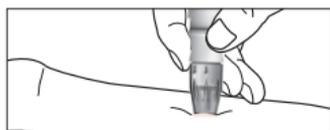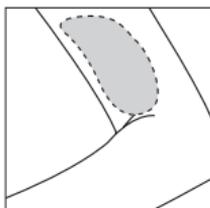

Lavare accuratamente ed asciugare l'area in cui effettuare il test, quindi effettuare la puntura utilizzando la penna pungidito in dotazione con il Kit, seguendo le istruzioni già riportate in precedenza in questo manuale

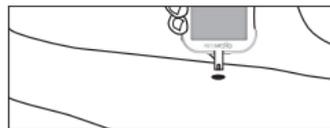

Favorire la fuoriuscita del quantitativo di sangue necessario ad effettuare il test

Effettuare il test come già illustrato in precedenza in questo manuale.


## Connessione al PC

E' possibile trasferire ad un PC i risultati delle misure effettuate.

Per prima cosa occorre acquistare il cavo USB di connessione e il CD contenente il software (opzionali, non in dotazione con il Kit) rivolgendosi al proprio rivenditore.

Successivamente occorre collegare il cavo ed installare il software seguendo le istruzioni contenute all'interno del CD.


Ad installazione avvenuta sarà possibile scaricare sul PC i risultati delle misure memorizzate nella memoria del glucometro, visualizzarli e stamparli.

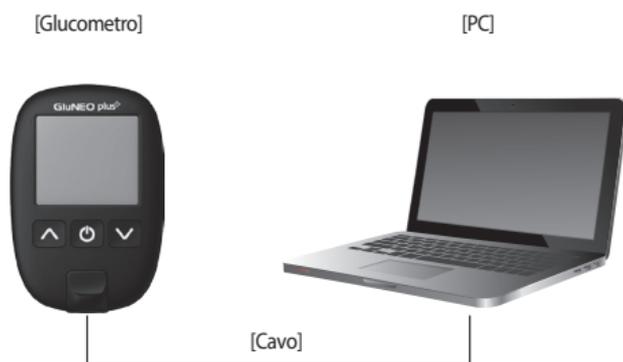



## I MESSAGGI D'ERRORE

Messaggio	Significato	Azione richiesta
	Il glucometro si è bloccato	Rimuovere e reinserire la batteria Se il problema persiste contattare il vostro rivenditore
	Striscia reattiva già utilizzata oppure umida	Inserire una nuova striscia reattiva e ripetere il test
	Quantitativo di sangue insufficiente oppure errato posizionamento della striscia sulla goccia di sangue	Inserire una nuova striscia reattiva e applicare correttamente il quantitativo di sangue richiesto
	Striscia reattiva danneggiata	Inserire una nuova striscia reattiva e ripetere il test

## MESSAGGI D'ERRORE

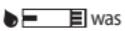Messaggio	Significato	Azione richiesta
	<p>Il campione di sangue è stato applicato prima del seguente segnale lampeggiante</p>  was	<p>Ripetere il test applicando la gocciolina di sangue solo dopo il seguente segnale lampeggiante</p>  was
	<p>Utilizzo di striscia reattiva non compatibile con il glucometro oppure la striscia è esposta direttamente ai raggi solari</p>	<p>Inserire una nuova striscia compatibile con il glucometro oppure evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e ripetere il test</p>
	<p>La temperatura ambiente è minore di 10°C</p>	<p>Porre la striscia reattiva a temperatura compresa tra 10°C e 40°C per almeno 30 minuti e quindi ripetere il test</p>
	<p>La temperatura ambiente è maggiore di 40°C</p>	<p>Porre la striscia reattiva a temperatura compresa tra 0°C e 40°C per almeno 30 minuti e quindi ripetere il test</p>
	<p>Il risultato del test è inferiore a 20 mg/dL</p>	<p>Potreste avere valori di glucosio molto bassi pertanto ripetete il test con una nuova striscia reattiva e, se il risultato rimane invariato, consultate immediatamente il vostro medico prima di intraprendere qualsiasi altra azione o terapia.</p>

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

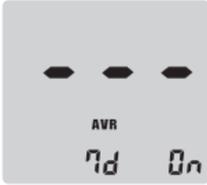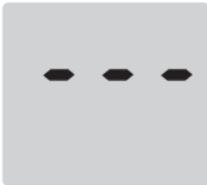Messaggio	Significato	Azione richiesta
	Il risultato del test è maggiore di 600 mg/dL	Potreste avere valori di glucosio molto alti pertanto ripetete il test con una nuova striscia reattiva e, se il risultato è invariato, consultate immediatamente il vostro medico prima di intraprendere qualsiasi altra azione o terapia.
	Non ci sono risultati di test in memoria	Inserire una nuova striscia reattiva ed effettuare il primo test
	Non ci sono sufficienti risultati in memoria per poter effettuare il calcolo della media	
Il glucometro non si accende	La batteria è scarica oppure il glucometro si è guastato	Sostituire la batteria e, in caso il problema persista, contattare il vostro rivenditore
Il test non viene eseguito dopo aver applicato la gocciolina di sangue	Il quantitativo di sangue applicato potrebbe non essere sufficiente	Inserire una nuova striscia e ripetere il test con un quantitativo di sangue adeguato
Credete che il risultato del test non sia plausibile	La striscia reattiva potrebbe essere difettosa o alterata	Ripetere il test con una nuova striscia e consultare il proprio medico

## Caratteristiche Tecniche

Tipo di sangue	Sangue intero capillare o venoso
Volume di sangue	0.5 µl
Intervallo di misura	20 ~ 600 mg/dL
Tempo di misura	5 secondi
Calibrazione	Plasma equivalente
Intervallo di correzione dell'ematocrito	20 ~ 65 %
Massima altitudine consentita	fino a 3048 metri
Valori di Temperatura consentita	10 ~ 40 °C
Valori di Umidità consentiti	10 ~ 90 % RH
Temperatura di conservazione delle strisce	Conservazione: 10 ~ 40 °C evitare esposizione a raggi solari e non congelare
Tipo di Display	LCD
Dimensioni (L x A x P)	86 x 57 x 18 (mm)
Peso	44 ± 1g (inclusa la batteria)
Alimentazione	Una batteria "a bottone" tipo CR2032 X 1EA da 3V
Durata della batteria	12 mesi

## SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	Leggere le istruzioni
	Scadenza
<b>CE 0123</b>	Certificazione e numero dell'Organismo notificato in Europa
	Avvertenze
<b>IVD</b>	Dispositivo Medico Diagnostico In-vitro
<b>LOT</b>	Numero di lotto
	Utilizzare solo una volta
<b>SN</b>	Numero seriale
	Data di produzione
	Produttore
	Non esporre direttamente ai raggi solari
	Smaltimento RAEE
	Intervallo di temperatura consentito
<b>REF</b>	Identificativo di catalogo
<b>SELF-TESTING</b>	Per Autocontrollo
<b>EC REP</b>	Rappresentante autorizzato in Europa
	Smaltimento Batterie ed Accumulatori

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

# GIUNEO<sup>®</sup> plus<sup>+</sup>

 OSANG Healthcare Co.,Ltd.  
132, Anyangcheondong-ro, Dongan-gu, Anyang-si,  
Gyeonggi-do, Korea (14040)  
[www.osanghc.com](http://www.osanghc.com)

---

 Obelis S.A

Bd. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium  
Tel : +(32)2.732.59.54 / Fax : +(32)2.732.60.03  
E-mail : [mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)

 INFM003KIT