

NUOVO GERMO DETERGENTE

DISINFETTANTE DETERGENTE LIQUIDO
CONCENTRATO PER STRUMENTI E AMBIENTI

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n° 9658

COMPOSIZIONE:**100 g di prodotto contengono:**

Didecildimetilammonio Cloruro.....10 g
Isotiazolinonmagnesio Cloruro sol.....0,2 g
Coformulanti e olii essenziali q.b. a.....100 g

ASPETTO:

Liquido color giallo paglierino

PROFUMO:

Intenso, alla citronella

BIODEGRADABILITA':

Detergente conforme al regolamento CE n° 648/2004

**ATTIVITA' E TEMPO
DI AZIONE:***** AZIONE DISINFETTANTE**

L'associazione fra un particolare Sale Quaternario d'Ammonio e Isotiazolinonmagnesio Cloruro (a spiccata azione antifungina ed antimuffa) garantisce un totale spettro d'azione nei confronti di:

- batteri gram+ e gram-
- funghi
- virus

Lasciare agire per almeno 3'.

***AZIONE DETERGENTE**

Il NUOVO GERMO DETERGENTE contiene tensioattivi non ionici ad elevato effetto pulente sulle superfici.

INDICAZIONI D'USO:

Diluire il NUOVO GERMO DETERGENTE in acqua in ragione del 1/2% per la disinfezione e detersione di superfici, banchi di lavoro, piastrelle, pavimenti, impianti igienici, utilizzando anche macchine lavapavimenti. Trova larga applicazione nelle Comunità (ospedali, ambulatori, case di riposo, palestre, piscine) per la disinfezione detersione delle superfici.

GERMO S.p.A.	SCHEMA TECNICA	Doc. STP N° 04 Emissione 06/06/2006 Rev. 03/06 Pagina 2 di 2
---------------------	-----------------------	---

TOLLERABILITA':

E' ben tollerato dalla cute, non ingerire.

AVVERTENZE:

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per uso esterno. Evitare che il prodotto concentrato venga a contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua. Il prodotto è nocivo se ingerito. Non disperdere dopo l'uso il contenitore vuoto nell'ambiente.

CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.

VALIDITA':

5 anni – confezione integra.

CONFEZIONI:

Tanica da 5 lt in cartoni da 4 taniche. Per ogni cartone (4 taniche) viene fornito in dotazione un tappo forato con pompetta dosatrice al fine di facilitare il dosaggio.
CODICE PRODOTTO B062

**MODALITA' DI
CONSERVAZIONE:**

Nella sua confezione originale si conserva per il periodo di validità indicato.

FORMULAZIONE COPERTA DA BREVETTO