

CARROZZINA IN ALLUMINIO ARDEA ONE

MANUALE DI ISTRUZIONI

INDICE

1. CODICI	pag.3
2. INTRODUZIONE	pag.3
3. DESTINAZIONE D'USO	pag.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	pag.3
5. AVVERTENZE GENERALI	pag.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA	pag.4
7. DESCRIZIONE GENERALE	pag.4
7.1 Vista ed elenco delle parti	pag.4
8. MONTAGGIO/SMONTAGGIO	pag.5
8.1 Apertura	pag.5
8.2 Chiusura	pag.5
8.3 Regolazione della carrozzina	pag.5
8.3.1 Schienale	pag.5
8.3.2 Ruote posteriori	pag.6
8.3.3 Ruote anteriori	pag.6
8.3.4 Pedana unica	pag.7
8.3.5 Freni	pag.7
8.3.6 Fianchetti laterali	pag.7
8.3.7 Regolazione della profondità della seduta	pag.7
8.3.8 Regolazione dello schienale tensionabile	pag.8
9. PRIMA DI OGNI USO	pag.8
10. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO	pag.8
11. MODALITÀ D'USO	pag.8
11.1 Salire sulla carrozzina	pag.8
11.2 Scendere dalla carrozzina	pag.8
11.3 Scalini e dislivelli (consigli per affrontarli da soli al meglio)	pag.9
11.4 Uso dei braccioli (OPTIONAL CLA210)	pag.9
11.5 Uso delle ruote posteriori grandi	pag.9
11.6 Uso delle ruote piccole per passaggi stretti (OPTIONAL CLA221)	pag.9
11.7 Uso dei freni	pag.10
11.8 Trasporto su mezzi di spostamento	pag.10
12. MANUTENZIONE	pag.10
13. PULIZIA E DISINFEZIONE	pag.10
13.1 Pulizia di rivestimenti e imbottiture	pag.10
13.2 Pulizia del telaio e parti metalliche	pag.10
13.3 Pulizia di ruote e freni	pag.10
13.4 Disinfezione	pag.10
14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	pag.10
15. CARATTERISTICHE TECNICHE	pag.11
15.1 Dimensioni e pesi	pag.11
15.2 Specifiche tecniche	pag.11
16. ACCESSORI OPTIONAL	pag.11
16.1 Braccioli (CLA210)	pag.11
16.2 Pedane separate (CLA211)	pag.11
16.3 Pedana unica allargata (CLA212)	pag.12
16.4 Maniglie di spinta (CLA240)	pag.12
16.5 Supporto per l'inclinazione dello schienale (CLA235)	pag.12
16.6 Kit allungamento in profondità seduta (CLA242-1 / CLA242-2)	pag.12
16.7 Ruote anteriori (CLA215 - CLA216 - CLA217)	pag.13
16.8 Ruote per i passaggi stretti (CLA221)	pag.13
16.9 Ruote antibaltamento (CLA220)	pag.13
16.10 Anelli di spinta con supergrip (CLA232)	pag.13
16.11 Ruote posteriori imperforabili (CLA230)	pag.14
16.12 Ruote posteriori pneumatiche a 24 raggi (CLA231)	pag.14
16.13 Kit poggiatesta (CLA243)	pag.14
16.14 Kit prolunga schienale (CLA244)	pag.14
16.15 Kit freni radiali (CLA241)	pag.14
16.16 Kit cinturini fermapiedi (CLA245)	pag.15
16.17 Kit cinturini fermatallon (CLA245)	pag.15
17. GARANZIA	pag.15
18. RIPARAZIONI	pag.15
19. RICAMBI	pag.16
20. CLAUSOLE ESONERATIVE	pag.16

CE Dispositivo Medico di Classe I D. Lgs. 24/02/97 n.46
attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

1. CODICI

- CL200x-38** Carrozzina pieghevole superleggera Atmos - seduta 38 cm
CL200x-40 Carrozzina pieghevole superleggera Atmos - seduta 40 cm
CL200x-42 Carrozzina pieghevole superleggera Atmos - seduta 42 cm
CL200x-44 Carrozzina pieghevole superleggera Atmos - seduta 44 cm
CL200x-46 Carrozzina pieghevole superleggera Atmos - seduta 46 cm

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto una carrozzina **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. realizzata per lo spostamento di persone con difficoltà di movimento sia dentro che fuori casa, in viaggio o nelle semplici attività giornaliere. Questo manuale d'uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell'ausilio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare la carrozzina. In caso di dubbi Vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

N.B. Controllare che tutte le parti della carrozzina non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

3. DESTINAZIONE D'USO

Questa carrozzina è destinata alla mobilità di persone con difficoltà motorie e può essere utilizzata ad autospinta.

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facente parte della famiglia carrozzine è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE e successive modifiche come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva;
2. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA**;
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE**;
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE**;
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I;

6. NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.;

7. Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche.

5. AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapista.
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili.
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti degli arti e lesioni personali.
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.
- Per sollevare correttamente la carrozzina è necessario richiuderla seguendo le istruzioni presenti in questo manuale e successivamente afferrarla per lo schienale.
- Non sollevare la carrozzina da parti amovibili che potrebbero accidentalmente staccarsi durante il sollevamento.

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

REF Codice prodotto

LOT Lotto di produzione

MD Dispositivo Medico

UDI Identificativo univoco del dispositivo

CE Marchio CE


i Leggere il manuale per le istruzioni

Factory Fabbricante

Waste Condizioni di smaltimento

7. DESCRIZIONE GENERALE

7.1 Vista ed elenco delle parti

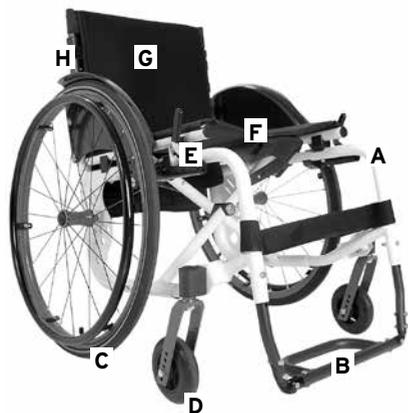

A - Telaio base della carrozzina

B - Pedana unica ribaltabile

C - Ruote posteriori grandi (diametro 60 cm)

D - Ruote anteriori imperforabili (diametro 12 cm)

E - Freni di stazionamento

F - Tela sedile

G - Rivestimento imbottito dello schienale

H - Cinghie per il tensionamento dello schienale

8. MONTAGGIO/SMONTAGGIO

La carrozzina può essere piegata con facilità, senza l'utilizzo di attrezzi, eseguendo poche operazioni manuali.

8.1 Apertura



N.B. Fare riferimento alle avvertenze di sicurezza di questo manuale di istruzioni.

- Afferrare i tubi della seduta e tirare verso l'esterno premendo verso il basso facendo attenzione che la carrozzina risulti completamente aperta.
- Abbassare la pedana unica fino ad agganciarla nell'apposito supporto. (FIG.1)

8.2 Chiusura

N.B. Fare riferimento alle avvertenze di sicurezza di questo manuale di istruzioni.

- Sollevare la pedana unica dal supporto.
- Alzare la seduta facendo riavvicinare i tubi dello schienale. (FIG.2)

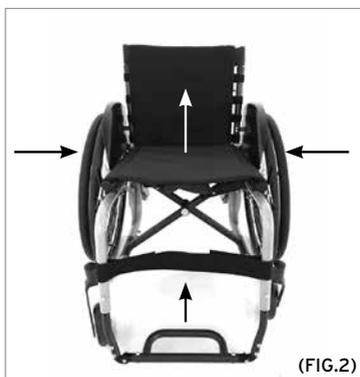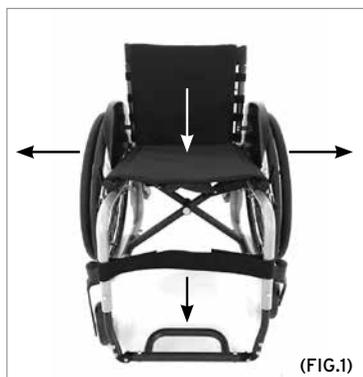

8.3 Regolazioni della carrozzina




ATTENZIONE!

REGOLAZIONI DELLA CARROZZINA - La carrozzina Atmos consente di effettuare delle regolazioni. Le regolazioni dello schienale, delle ruote anteriori e posteriori e della seduta dovrebbero essere effettuate sotto il controllo di un operatore specializzato al fine di garantirne la massima efficacia in relazione alle esigenze del paziente.

N.B. Nella confezione del prodotto e degli Optional non sono inclusi strumenti ed attrezzi atti alle regolazioni e/o al montaggio di optional originali. Si consiglia di utilizzare strumenti di buona qualità per non rovinare struttura e materiali.

8.3.1 Schienale

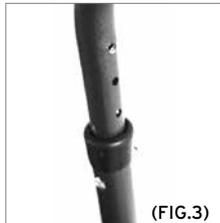


È regolabile in altezza tramite i tubi telescopici dello schienale stesso. Rimuovere la copertura imbottita dello schienale e la tela proteggi cinghie tensionabili. Allentare le cinghie tensionabili; togliete le viti che fissano i tubi telescopici e regolarli all'altezza desiderata. Stringere le viti, serrare le cinghie tensionabili e riposizionare la tela proteggi cinghie e l'imbottitura morbida dello schienale stesso. (FIG.3)

8.3.2 Ruote posteriori



(FIG.4)

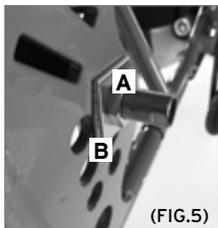

(FIG.5)

Sono regolabili in altezza, profondità ed inclinazione; rimuovere le ruote posteriori premendo il tasto dello sganciamento rapido al centro delle ruote stesse e sfilando i perni di fissaggio. (FIG.4)

Svitare i supporti delle ruote dal telaio e riavvitarli nei fori scelti all'altezza e/o alla profondità desiderata (FIG.5-A). Se si vuole che

la convergenza (camber) iniziale rimanga a 4° controllare che le piastrine per la regolazione rimangano nella posizione iniziale. Nel caso si voglia portare la convergenza a 0° , rimuovere le piastrine (FIG.5-B). Riposizionare le rondelle e le boccole di fissaggio sul telaio, reintrodurre i perni nelle ruote ed infilarli nei fori sul telaio, accertarsi che i perni siano ben inseriti.




ATTENZIONE!

Attenzione allo spostamento delle ruote posteriori può corrispondere anche una regolazione delle ruote anteriori e dei freni.



(FIG.6)

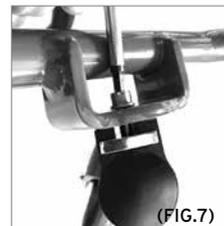

(FIG.7)

8.3.3 Ruote anteriori

Sono regolabili in altezza ed inclinazione; in altezza tramite i fori presenti sulle forcelle anteriori, svitando le viti di fissaggio e riavvitandole dopo il riposizionamento delle ruote stesse all'altezza prescelta (FIG.6).


In inclinazione smontando la forcella dal telaio (FIG.7), sfilando le piastrine poste all'interno della struttura sul telaio (una superiore ed una inferiore) reinserendole di nuovo in una delle 4 posizioni possibili (FIG.8-9-10-11). Reinserrire le viti e fissarle bene. Ripetere l'operazione, con le stesse misurazioni anche sulla ruota opposta.



(FIG.8)



(FIG.9)

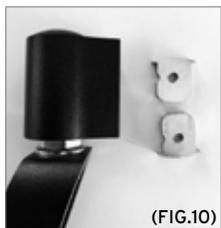

(FIG.10)




(FIG.11)



ATTENZIONE!

Attenzione allo spostamento delle ruote anteriori non deve necessariamente corrispondere anche la regolazione delle ruote posteriori.

8.3.4 Pedana unica

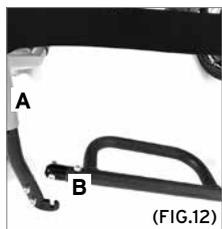


È regolabile in altezza ed inclinazione. Per modificare l'altezza svitare le viti passanti poste sulla struttura del telaio. Individuare i fori all'altezza desiderata, reintrodurre le viti e fissare bene (FIG.12-A). Per regolare l'inclinazione allentare le viti passanti poste nella parte laterale della pedana stessa (FIG.12-B); regolare l'inclinazione nella posizione voluta e fissare bene le viti.

8.3.5 Freni



Allentando le viti del supporto sul telaio si possono regolare sia in profondità che in altezza.

8.3.6 Fianchetti laterali

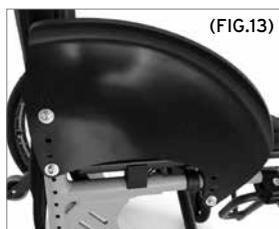

Svitare le viti posteriori di fissaggio sul telaio, allentare la vite anteriore e in base alla posizione della ruota, reintrodurle e fissarle bene. I fianchetti devono essere posizionati molto vicino ai bordi superiori delle ruote in quanto servono come ammortizzatori nella fase di spinta nella movimentazione in salita e in uscita dalla carrozzina. (FIG.13)

8.3.7 Regolazione della profondità della seduta

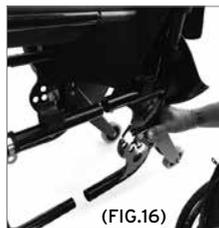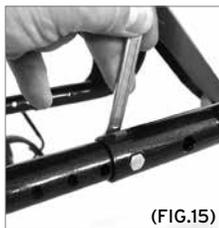

Posizionare la carrozzina su una superficie comoda (banco di lavoro).

Rimuovere le viti di fissaggio del telaio, superiori (FIG.14) e inferiori (FIG.15), e dello schienale (fianchetti posteriori)

(FIG.13) liberando i tubi telescopici all'interno della struttura (FIG.16).


Spostare la struttura del telaio all'indietro fino ad individuare i nuovi buchi nella posizione voluta (step di 2 cm.) fino ad un massimo di 10 cm. Regolare i fianchetti laterali compatibilmente con la nuova misura della seduta. Fissare bene le viti.



ATTENZIONE!

Attenzione se non si desidera avere un allontanamento troppo evidente della seduta dallo schienale si consiglia il montaggio dell'OPTIONAL CLA242-1 o CLA242-2 Kit variazione profondità della seduta.

8.3.8 Regolazione dello schienale tensionabile

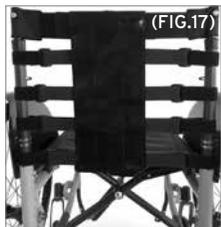

La tensione dello schienale è regolabile per facilitare il contenimento del tronco: Rimuovere il cuscino imbottito di copertura dello schienale, allentare le fasce in velcro e sistemare il paziente in maniera da consentire un maggior avvolgimento del tronco. Richiudere le fasce e riposizionare il cuscino imbottito dello schienale. (FIG.17)

9. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco così da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose.
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al corretto inserimento delle ruote posteriori.
- Verificare che la seduta sia completamente aperta in posizione finale di blocco (se così non fosse, premere ulteriormente con forza la seduta in basso verso il telaio).
- Verificare il corretto funzionamento del freno sulle ruote posteriori.

10. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- La carrozzina non può essere usata come sedile su veicoli a motore.
- Assicurarci sempre che il comando del freno sia ben regolato e funzionante.
- Si raccomanda di fare attenzione all'intrappolamento delle dita in alcune parti come ruote o freni durante l'utilizzo della carrozzina.
- Si ricorda che la temperatura della superficie della carrozzina può aumentare quando esposta a fonti di calore esterne, come luce solare.

11. MODALITÀ D'USO

N.B. Fare riferimento alle avvertenze generali di questo manuale istruzioni



ATTENZIONE!

- Salire e scendere da soli dalla carrozzina è un'operazione potenzialmente pericolosa: fatelo solo se fisicamente in grado e con cautela.
 - Non appoggiarsi sulle parti amovibili, preferire il telaio della seduta.
- NON GRAVARE IL PESO SUI POGGIAPIEDI DURANTE LA SALITA O LA DISCESA DALLA CARROZZINA, PERICOLO DI RIBALTAMENTO!!!**

11.1 Salire sulla carrozzina

- Avvicinare la carrozzina il più possibile in modo da posizionarla di fianco a voi
- Bloccare i freni delle ruote posteriori; per agevolare al massimo la salita sulla carrozzina si consiglia di togliere il bracciolo, se presente, dal lato dove si effettuano queste operazioni
- Appoggiarsi alla struttura del telaio facendo forza sulle braccia, dunque scendere lentamente verso la seduta

11.2 Scendere dalla carrozzina

- Avvicinarsi il più possibile a fianco di una nuova seduta
- Bloccare i freni delle ruote posteriori; per agevolare al massimo la discesa dalla carrozzina si consiglia di togliere il bracciolo, se presente, dal lato dove si effettuano queste operazioni

- Appoggiare le braccia al telaio della seduta sulla quale ci si deve trasferire e sollevandosi scivolare lentamente verso quest'ultima

11.3 Scalini e dislivelli (consigli per affrontarli da soli al meglio)



ATTENZIONE!

Queste tecniche sono valide solo per utilizzatori esperti di sedie a rotelle. In tutti gli altri casi si raccomanda di farsi aiutare da un'assistente!

SALIRE

Portarsi in corrispondenza del bordo del marciapiede o dello scalino da superare. Bilanciare la carrozzina sulle ruote posteriori in modo da sollevare le ruote anteriori quanto basta per appoggiarle sull'ostacolo da superare. Inclinare il busto in avanti e spingere energicamente in avanti il corrimano presente sulle ruote posteriori. Continuare a spingere finché le ruote posteriori non siano salite sopra l'ostacolo.

SCENDERE

Per scendere il dislivello eseguire la procedura inversa. Posizionarsi con la parte posteriore della carrozzina davanti al dislivello da superare, trattenere energicamente il corrimano delle ruote posteriori quindi scendere lentamente il gradino oppure l'ostacolo; successivamente bilanciare la carrozzina sulle ruote posteriori in modo da sollevare leggermente le ruote anteriori e terminare delicatamente la discesa.



ATTENZIONE!

Si raccomanda di non utilizzare questa tecnica in presenza di un dislivello superiore ai 10 cm!

11.4 Uso dei braccioli (OPTIONAL CLA210)

I braccioli possono essere solo ribaltabili: questa funzione risulta molto comoda per salire o scendere dalla carrozzina. Per ribaltare il bracciolo è sufficiente ruotarlo verso la parte posteriore.

11.5 Uso delle ruote posteriori grandi

Le ruote posteriori grandi di 60 cm servono per condurre la carrozzina ad auto spinta. Per fare questo impugnare il corrimano presente sulla ruota e spingerlo nella direzione richiesta. Le ruote posteriori possono essere collocate in diverse posizioni. Per una migliore e corretta regolazione si raccomanda di consultare un rivenditore specializzato che saprà consigliarvi la migliore configurazione.

11.6 Uso delle ruote piccole per passaggi stretti (OPTIONAL CLA221)

Questo tipo di ruote serve esclusivamente per permettere uno spostamento breve della carrozzina finalizzato al passaggio in ambienti particolarmente stretti (ad esempio le porte di un ascensore). Per utilizzare queste routine è necessario sollevare la carrozzina per estrarre le ruote posteriori grandi, quindi spingere la carrozzina facendola appoggiare posteriormente sulle ruote piccole, successivamente reinserire le ruote posteriori grandi.

N.B. Le ruote posteriori grandi sono dotate di sistema a sgancio rapido. Premere il pulsante al centro della ruota ed estrarle verso l'esterno. Per inserirle nuovamente è sufficiente allineare l'albero della ruota con il foro del mozzo sul telaio e spingere verso l'interno fino a corretto bloccaggio della clip di sicurezza.

11.7 Uso dei freni

Le ruote posteriori grandi sono dotate di freno meccanico ad inserimento manuale. Per bloccare le ruote impugnare la leva di azionamento e spingerla in avanti. Per sbloccare le ruote invece spingere la leva di azionamento nella direzione opposta.

11.8 Trasporto su mezzi di spostamento

La carrozzina è concepita per essere facilmente trasportata. Una volta alzata la pedana e rimosse le ruote posteriori, può essere richiusa e comodamente posizionata, per esempio, nel bagagliaio di un autoveicolo. Se non è possibile per motivi di spazio, sistemare la carrozzina davanti al sedile posteriore in modo che sia stabile e non possa ribaltare o scivolare. Se possibile, bloccare la carrozzina con la cintura di sicurezza dell'autoveicolo.

12. MANUTENZIONE

I dispositivi della linea ARDEA ONE by Moretti S.p.A. al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del prodotto. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali. Prima di utilizzare il dispositivo eseguire tutte le verifiche e i controlli suggeriti nel paragrafo "PRIMA DI OGNI USO" di questo manuale istruzioni. Le carrozzine ARDEA ONE necessitano di poche ed elementari manutenzioni periodiche, qui di seguito elenchiamo i controlli da effettuare periodicamente:

Capacità frenante	Mensile
Pulizia della seduta	Secondo necessità

13. PULIZIA E DISINFEZIONE

13.1 Pulizia di rivestimenti e imbottiture

I rivestimenti e le imbottiture sono realizzati in Nylon. E possono essere puliti con acqua e sapone neutro.

13.2 Pulizia del telaio e parti metalliche

Anche per il telaio e le parti metalliche è possibile utilizzare acqua e sapone neutro, quindi asciugare con un panno morbido in modo da non graffiare la verniciatura del telaio.

13.3 Pulizia di ruote e freni

Allo stesso modo anche le ruote possono essere pulite con acqua e sapone neutro. Prestare molta attenzione all'asciugatura: potrebbe essere molto pericoloso utilizzare la carrozzina con le ruote ancora umide.

13.4 Disinfezione

Se è necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante.

N.B Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.

14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

15. CARATTERISTICHE TECNICHE

15.1 Dimensioni e pesi

DIMENSIONI E PESI

Misure in CM												
CL200*-38				38								
CL200*-40			Fronte 50÷55	40								
CL200*-42	85	40÷50		42	31÷41	60	35	12,4 Kg	60	12	optional	120 Kg
CL200*-44			Retro 44÷49	44								
CL200*-46				46								

*A seconda del colore telaio scelto:

Misure in cm indicative

- B - Bianco
- N - Nero opaco
- R - Rosso
- P - Personalizzato

15.2 Specifiche tecniche

- Telaio in alluminio
- Portata max: 120 Kg
- Ruote anteriori in PU diametro 12 cm
- Ruote posteriori grandi pneumatiche 36 raggi diametro 60 cm
- Rivestimento in Nylon
- Resistenza all'accensione: I materiali utilizzati per il rivestimento e l'imbottitura sono stati sottoposti a prova con metodi specificati nella EN1021-1/2
- Norme di riferimento: EN 12183
- Temperatura dell'ambiente operativo: -20 C° / + 40 C°
- Conservazione consigliata: Conservare in luogo fresco ed asciutto e comunque sempre lontano da fonti dirette di calore come la luce solare. (temp. Consigliata tra +10 C° / + 40 C°)


16. ACCESSORI OPTIONAL

N.B. Non sono inclusi strumenti ed attrezzi atti alle regolazioni e/o al montaggio di optional originali. Si consiglia di utilizzare strumenti di buona qualità per non rovinare struttura e materiali.



16.1 Braccioli (CLA210)

Rimuovere le ruote posteriori, posizionare il bracciolo all'altezza desiderata. Aprire il foro predisposto sul telaio (se non già disponibile) con un attrezzo idoneo. Infilare le viti passanti in dotazione con il kit e serrarle bene. Ripetere l'operazione con il bracciolo opposto.

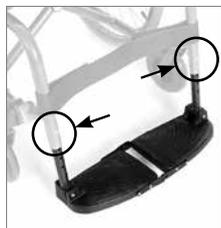


16.2 Pedane separate (CLA211)

Alzare la pedana unica, svitare le viti passanti poste nella struttura del telaio, sfilare i tubi telescopici della pedana unica ed inserire i tubi di supporto delle pedane, una per parte. Inserire le viti passanti e serrare bene. **N.B.** In fase di abbassamento delle pedane separate agganciarle bene prima dell'utilizzo con i ganci presenti sui bordi delle pedane stesse.




16.3 Pedana unica allargata (CLA212)

Alzare la pedana unica, svitare le viti passanti poste nella struttura del telaio, sfilare i tubi telescopici della pedana unica ed inserire i tubi di supporto delle pedane, una per parte. Inserire le viti passanti e serrare bene.

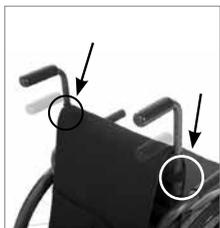

16.4 Maniglie di spinta (CLA240)

Rimuovere la copertura imbottita dello schienale e la tela proteggi cinghie tensionabili. Rimuovere le cinghie tensionabili; togliere le viti che fissano i tubi telescopici standard, sostituirli con quelli dotati di maniglie di spinta regolandoli all'altezza desiderata. Stringere le viti, reinserire le cinghie tensionabili e riposizionare la tela proteggi cinghie e l'imbottitura morbida dello schienale stesso.

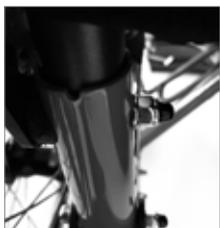


16.5 Supporto per l'inclinazione dello schienale (CLA235)

Svitare le viti di fissaggio dello schienale al telaio; introdurre il supporto per la regolazione in inclinazione e fissarlo al telaio con le viti passanti. Introdurre i tubi dello schienale nel supporto e fissarli con le viti passanti dopo avere regolato l'inclinazione dello schienale desiderata.

16.6 Kit allungamento in profondità seduta (CLA242-1 / CLA242-2)


N.B. Posizionare la carrozzina su una superficie comoda (banco di lavoro).

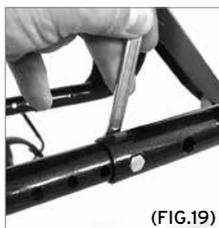

Posizionare la carrozzina su una superficie comoda (banco di lavoro).

Rimuovere le viti di fissaggio del telaio, superiori (FIG.18) e inferiori (FIG.19), e dello schienale

(fianchetti posteriori) (FIG.13) liberando i tubi telescopici all'interno della struttura (FIG.20). Spostare la struttura del telaio all'indietro fino ad individuare i nuovi buchi nella posizione voluta (step di 2 cm.) fino ad un massimo di 10 cm.

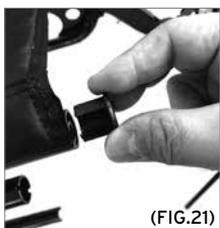

Rimuovere i tappi di bloccaggio della tela seduta (FIG.21) e sfilarla avvicinando leggermente i lati della carrozzina. Introdurre i supporti del kit per la variazione profondità (4/6 cm. oppure 8/10 cm.) nei fori della parte posteriore del telaio seduta (FIG.22). Fissare i tubi di allungamento con le apposite viti. Reinserrire tutte le viti di fissaggio del telaio e serrare bene.

Introdurre la tela in dotazione al kit facendola scivolare dal davanti del sedile (la taschina porta oggetti deve trovarsi sotto e in avanti). Rimettere i tappi nei 4 fori. Controllare il fissaggio delle viti a carrozzina aperta.

N.B. Regolare i fianchetti laterali compatibilmente con la nuova misura della seduta.

16.7 Ruote anteriori (CLA215 - CLA216 - CLA217)



CLA215



CLA216



CLA217

Svitare le viti di fissaggio, togliere le ruote presenti, inserire le nuove ruote e riavvitare dopo il riposizionamento all'altezza prescelta.


CLA215: ø 10 cm impermeforabili, PAIO

CLA216: ø 15 cm impermeforabili, PAIO

CLA217: ø 17,5 cm pneumatiche, PAIO


N.B. Controllare l'inclinazione della seduta dopo l'installazione di ruote differenti, compensando l'eventuale dislivello con la regolazione delle ruote posteriori.

16.8 Ruote per i passaggi stretti (CLA221)

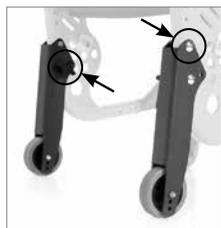

Togliere le ruote posteriori, individuare la posizione in altezza del supporto delle ruotine per passaggi stretti, liberare eventuali fori pre-tagliati sul telaio e liberarli per l'introduzione delle viti passanti. Serrare bene le viti. Reinserire le ruote posteriori controllando che le ruotine non tocchino il terreno.

16.9 Ruote antiribaltamento (CLA220)

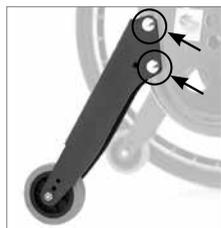

Togliere le ruote posteriori, individuare la posizione in altezza del supporto delle ruote antiribaltamento, liberare eventuali fori pre-tagliati sul telaio e liberarli per l'introduzione delle viti passanti. Serrare bene le viti superiori. Reinserire le ruote posteriori ed inclinare il supporto delle ruotine nella posizione desiderata, inserire la vite con pomello nel supporto sul telaio e stringere bene.

16.10 Anelli di spinta con supergrip (CLA232)



Infilare gli anelli di spinta nell'anello per autospinta presente sulle ruote nella parte esterna.

16.11 Ruote posteriori imperforabili (CLA230)

Togliere le ruote posteriori premendo il tasto di sganciamento rapido, sfilare i perni e reinserirli nelle ruote di sostituzione infilandoli nei fori sul telaio; accertarsi che i perni siano ben inseriti.

N.B. Utilizzando ricambi originali i perni delle ruote sono compatibili con tutti i modelli forniti da MORETTI S.p.A.

16.12 Ruote posteriori pneumatiche a 24 raggi (CLA231)

Togliere le ruote posteriori premendo il tasto di sganciamento rapido, sfilare i perni e reinserirli nelle ruote di sostituzione infilandoli nei fori sul telaio; accertarsi che i perni siano ben inseriti.

N.B. Utilizzando ricambi originali i perni delle ruote sono compatibili con tutti i modelli forniti dalla MORETTI S.p.A.

16.13 Kit poggiatesta (CLA243)

Rimuovere la copertura imbottita dello schienale e la tela proteggi cinghie tensionabili. Rimuovere la cinghia tensionabile superiore e regolare lo schienale in altezza fino a scoprire il secondo foro superiore del tubo schienale. Riposizionare la cinghia tensionabile superiore e fissarla nella sua posizione assieme ai 2 supporti del poggiatesta. Rimettere la tela proteggi cinghie tensionabili e la copertura imbottita dello schienale. Introdurre la sbarra di fissaggio del poggiatesta nei fori dei supporti appena montati. Inserire il tubo del poggiatesta regolandolo nell'altezza desiderata e stringere la levetta.

16.14 Kit prolunga schienale (CLA244)

Rimuovere la copertura imbottita dello schienale e la tela proteggi cinghie tensionabili. Rimuovere la cinghia tensionabile superiore e regolare lo schienale in altezza fino a scoprire il secondo foro superiore del tubo schienale. Riposizionare la cinghia tensionabile superiore e fissarla nella sua posizione assieme ai 2 supporti della prolunga schienale. Rimettere la tela proteggi cinghie tensionabili e la copertura imbottita dello schienale. Introdurre la prolunga nei fori dei supporti appena montati.

16.15 Kit freni radiali (CLA241)

Rimuovere i freni di stazionamento standard allentando la clamp fissata sul telaio. Introdurre il supporto del freno radiale di stazionamento nella stessa posizione. Prima di fissare le viti regolare la posizione del freno di stazionamento in inclinazione e profondità fino alla posizione utile per una buona frenata.

16.16 Kit cinturini fermapiedi (CLA245)

Con pedane separate (CLA211) o pedana unica allungata (CLA212)



Infilare le strisce di stoffa velcrata nelle aperture presenti regolandole nella posizione desiderata.

16.17 Kit cinturini fermatalloni CLA245

Solo con pedane separate (CLA 211) o pedana unica allungata (CLA212)



Infilare le strisce di stoffa velcrata nelle aperture presenti regolandole nella posizione desiderata.

17. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso. Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

18. RIPARAZIONI

Riparazione in garanzia: Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia: Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

Prodotti non difettosi: Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

19. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

20. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ **Località** _____

Venduto a _____

Via _____ **Località** _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN ITALY



Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com