




OMRON

*I primi ad aver **risolto** un **grande inconveniente**.*


PROBLEMA →

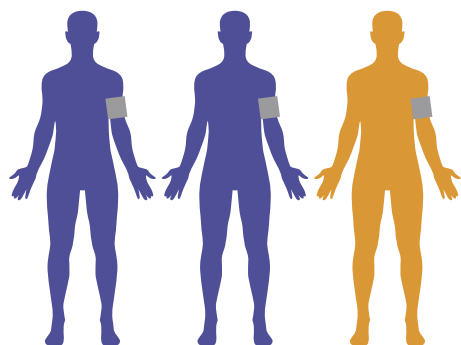

**1 PERSONA SU 3 NON MISURA
CORRETTAMENTE LA PRESSIONE***

L'inconveniente è dovuto al fatto che i bracciali standard dei misuratori devono essere posizionati in un'area ben specifica sopra l'arteria, sulla parte superiore del braccio.

BRACCIALI STANDARD

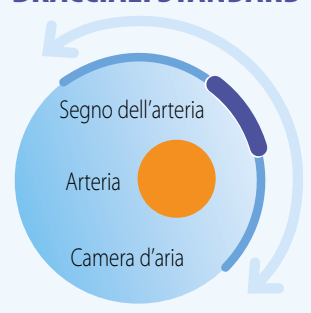

*Perleberg Research UK & IT, 2014.

SOLUZIONE

TECNOLOGIA INTELLI WRAP CUFF

Intelli Wrap Cuff è un bracciale intelligente che permette di misurare la pressione a 360°, in ogni posizione.

Grazie ad una superficie di rilevazione del 30% superiore rispetto agli altri misuratori di pressione, il tubo per il gonfiaggio può essere posizionato anche a 180° dall'arteria brachiale.



↑ *Posizionamento standard* ← *Posizionamento a 90°* → *Posizionamento a 180°*

IL BRACCIALE INTELLIGENTE INTELLI WRAP CUFF:

- consente di rilevare valori pressori con la stessa accuratezza delle misurazioni standard.
- è adatto per braccia con dimensione compresa tra 22-42 cm.





OMRON

L'innovativa tecnologia **Bluetooth** e
App dedicata **"Omron connect"**.



iPhone & Android™

- Esclusiva APP che **connette** a **smartphone** e **tablet**, i nuovi misuratori **Omron** (Evolv, M7 Intelli IT, RS7 Intelli IT) dotati di tecnologia **bluetooth**.
- **Facile** da usare e con un'interfaccia grafica particolarmente **intuitiva**.
- Permette di **trasferire, visualizzare, salvare** e **gestire sul device mobile** i dati rilevati con il misuratore condividendoli con altre App.
- Consente di avere sempre **a portata di mano i valori pressori**, monitorarne l'**andamento** e i **progressi** tramite il **My Journal** accessibile dalla Home.
- Si integra con i sistemi di gestione e monitoraggio dei parametri vitali per la trasmissione automatica dei valori pressori.



**La salute,
in un semplice
gesto.**



OMRON

Istruzioni per utilizzare l'app e connettere smartphone/tablet.

ACCENDERE IL DISPOSITIVO MOBILE E ATTIVARE LA FUNZIONE BLUETOOTH.

■ Scaricare e installare la app.

Accedere allo store e cercare "Omron connect".



■ Accedere alla app.

Selezionare la propria area geografica.
Accettare le condizioni per l'utilizzo e l'informativa sulla privacy.
Selezionare il proprio misuratore **Omron** e registrarlo.




■ Associare il dispositivo mobile al misuratore.

Premere per più di 2 secondi il pulsante di connessione (↔) sul misuratore.
Attendere che il simbolo (↔) e la lettera "P" lampeggino sul display del misuratore.
Seguire le istruzioni di associazione sul dispositivo mobile (il misuratore deve essere entro un raggio di 5 metri).
Se la connessione è avvenuta correttamente sul display del misuratore compare il simbolo (OK), in caso contrario l'indicazione "ERR".



■ Trasferire i dati dal misuratore al dispositivo mobile

Completata la misurazione della pressione, accedere alla app **Omron connect**.
Scorrere verso il basso per aggiornare la schermata: viene avviato il trasferimento dei dati. Verificare sul misuratore che i dati siano stati trasferiti correttamente (OK).

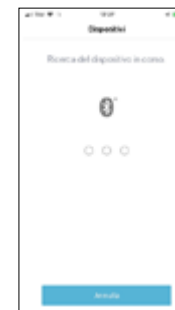

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO:
www.omronconnect.com



OMRON

CONTROLLO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

M7 Intelli IT

Accurato, high-tech e sempre "connesso" al cuore.



CARATTERISTICHE TECNICHE:



Sensore battiti cardiaci irregolari



Sensore movimento



Media ultime 3 misurazioni



Clinicamente Validato



Sensore posizione bracciale



Indicatori di ipertensione



Ipertensione mattutina



Bracciale comfort preformato 22-42 cm



100 memorie per 2 utenti



Rilevatore di fibrillazione atriale



Risultati in modalità confronto



Connessione Bluetooth



iPhone & Android™



Tecnologia Intelli Wrap