

Melgisorb® Ag

Medicazione antimicrobica in alginato altamente assorbente



Alginato contenente argento


- Fornisce un effetto antimicrobico prolungato
- I test in vitro mostrano un effetto antimicrobico da 4 ore a 14 giorni

Alginato con fibre CMC

- Adatto a ferite con essudato elevato
- Progettato per ferite superficiali e profonde
- Permette la rimozione in un unico pezzo

- Eccellente assorbimento per ferite profonde che trasudano pesantemente
- Fornisce un effetto antimicrobico prolungato
- L'elevata resistenza alle fibre consente la rimozione in un unico pezzo


Come utilizzare Melgisorb® Ag

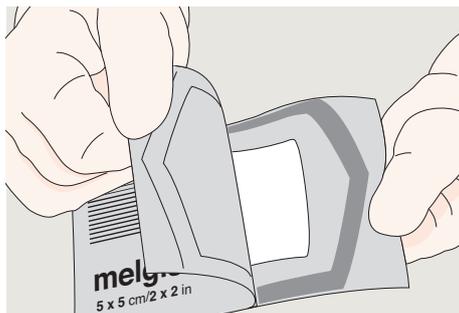

1. Detergere e irrigare il sito della ferita secondo i protocolli standard. Scegliere una dimensione di Melgisorb® Ag leggermente più grande della ferita. Tagliare o piegare la medicazione per adattarla alla ferita.



2. Riempire liberamente le ferite profonde, assicurandosi che la medicazione non si sovrapponga ai margini della ferita. Applicare direttamente sul letto della ferita.

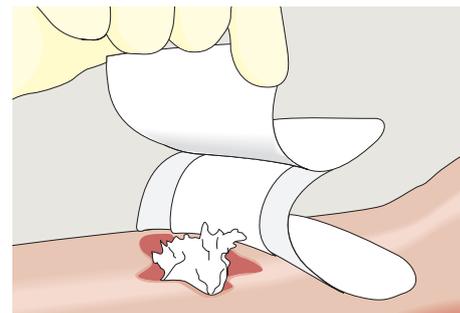

3. Coprire e fissare Melgisorb Ag con una medicazione secondaria.

Aree di utilizzo

Melgisorb Ag è indicato per la gestione di ferite da moderate a pesanti con essudato da parziale a pieno spessore come:

- ferite chirurgiche post-operatorie
- ferite da trauma (lesioni cutanee, lesioni da trauma o incisioni)
- ulcere alle gambe
- ulcere da pressione
- ulcere diabetiche
- siti di innesto e donor site
- ustioni a spessore parziale

Questo prodotto può essere utilizzato anche con bendaggi compressivi. Poiché il prodotto contiene alginato, può aiutare a supportare il controllo del sanguinamento minore nelle ferite superficiali. Melgisorb Ag può essere usato nella gestione di ferite infette o ferite in cui vi è un aumento di rischio di infezione (sotto la supervisione medica di un operatore sanitario). Melgisorb Ag è indicato solo per uso esterno.

Note

Melgisorb Ag può rimanere in situ fino a 7 giorni. La frequenza di cambio della medicazione dipenderà dalle condizioni della ferita e dal livello di essudato. Inizialmente, potrebbe essere necessario cambiare la medicazione ogni 24 ore. Se la ferita appare asciutta, saturare la medicazione con soluzione salina sterile prima della rimozione. Rimuovere delicatamente la medicazione dal letto della ferita. Irrigare il sito della ferita secondo i protocolli standard prima dell'applicazione di una nuova medicazione.

Controindicazioni

Melgisorb Ag non è indicato per l'uso su quanto segue:

- soggetti con una nota sensibilità agli alginati o all'argento
- per controllare il sanguinamento pesante
- per l'applicazione diretta su ferite asciutte o leggermente essudanti.

Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso



Assortimento (confezione sterile)

Codice articolo	Formato cm	Dispenser/TRP
256055	5 x 5	10/100
256105	10 x 10	10/100
256155	15 x 15	10/100
256205	20 x 30	5/50
256605	3 x 44	10/100

Per saperne di più visita il sito www.molnlycke.it

Mölnlycke Health Care Srl, Via Marsala, 40/C Gallarate VA, Italia, Tel +39 0331 714011. I marchi commerciali, i nomi e i loghi Mölnlycke, Exufiber, Mepilex, Safetac e Hydrolock sono registrati a livello globale a nome di una o più società del Gruppo Mölnlycke Health Care © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati. ITWC03271912


Mölnlycke®