

Nuovo dispenser per cerotti pronti all'uso

**"BOLERO"**

**NOVITA'**



Il nuovo dispenser **"BOLERO"** rende più semplice e veloce l'applicazione dei cerotti.

In 3 semplici mosse e **con una sola mano** si estrae il cerotto liberando la parte adesiva pronta per la medicazione.

Con il nuovo dispenser **"BOLERO"** si evitano gli sprechi e si ha il controllo sul consumo dei cerotti.

**"BOLERO"** viene fornito con tutto il necessario per l'applicazione a parete.

2 confezioni di cerotti in dotazione.



## Istruzioni d'uso



### Fase 1

Applicare il dispenser alla parete

Aprire il dispenser vuoto con l'apposita chiave in dotazione.

Inserire la chiave orizzontalmente nel foro del dispenser premere a fondo fino all'apertura.



### Fase 2

Inserire le ricariche negli appositi perni del dispenser tramite i fori posti alla base delle confezioni dei cerotti.

Chiudere nuovamente il dispenser senza l'utilizzo della chiave.



## Codici prodotti

DIS070 – Dispenser completo di 2 ricariche cerotti in tessuto  
1 ricarica 42 pz mm 19x72 + 1 ricarica 36 pz mm 25x72

DIS080 – Dispenser completo di 2 ricariche cerotti Blu detectable  
1 ricarica 42 pz mm 19x72 + 1 ricarica 36 pz mm 25x72

DIS061 – Dispenser vuoto



CER450 – Confezione di 6 ricariche 42 cerotti in tessuto mm 19x72

CER451 – Confezione di 6 ricariche 36 cerotti in tessuto mm 25x72

CER460 – Confezione di 6 ricariche 42 cerotti blu detectable mm 19x72

CER461 – Confezione di 6 ricariche 36 cerotti blu detectable mm 25x72

