



Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd
江苏苏云医疗器材有限公司

Add: No.1, Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China 1 222002

Istruzioni d'uso

REF 31457 Set otorinolaringoiatrico sterile monouso.

Componenti: 1pc speculum nasale, 2pcs speculum auricolari (adulto e pediatrico), 1pc abbassalingua in plastica, e 1pc pinzetta e 6pcs applicatore con punta in cotone, 2pcs specchietti laringei e 1pc salvietta.

Utilizzo del prodotto: Il prodotto è indicato nell'esame clinico ORL da parte di personale specializzato, lo speculum nasale a supporto dell'esame del naso, lo speculum auricolare per esaminare l'orecchio interno, abbassalingua e specchietto faringei sono utili per esame di bocca e gola. L'applicatore con punta di cotone può essere utilizzato per il campionamento e la pulizia. Prima dell'utilizzo, controllare che il pacco sia integro e che sia mantenuta la sterilità del contenuto, quindi esaminare che tutti i componenti siano nella piastra; provvedere a fissare la salvietta al paziente, per evitare ogni possibile contaminazione.

Attenzione: Non usare se il pacchetto è rotto. Prodotto monouso, non riutilizzare. Operare con la dovuta attenzione al fine di mantenere il paziente indenne da lesioni o ferite o da rottura accidentale durante l'utilizzo.


Conservazione: I prodotti devono essere conservati in un ambiente fresco, asciutto e pulito.

Data di scadenza: 5 anni dalla data di sterilizzazione.

Rev.1.10.18



Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd. - No.1 Medicine Lane, Renmin Road,
Lianyungang, Jiangsu Province. Made in China

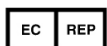

Shanghai International Holding Corp.
GmbH (Europe) - Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY