

SPECULUM MONOUSO - ISTRUZIONI PER L'USO

Istruzioni:

Afferrare saldamente lo speculum monouso con una mano. Posizionare il paziente in modo da permettere l'accesso corretto e un'illuminazione adeguata. Inserire delicatamente la punta dello speculum monouso nelle narici del paziente, con le lame in posizione "chiusa". Comprimerne lentamente l'impugnatura per allargare le lame dello speculum monouso e aprire le narici. Fermarsi appena si ottiene un'esposizione idonea.

IMPORTANTE: interrompere l'uso dello speculum monouso se il paziente avverte dolore oppure in presenza di traumi al naso o alla mucosa nasale.

DISPOSABLE SPECULUM - USER INSTRUCTIONS
SPEKULUM FÜR DEN EINMALGEBRAUCH - GEBRAUCHSANWEISUNG
ESPÉCULO DESECHABLE - INSTRUCCIONES DE USO
SPÉCULUM JETABLE - MODE D'EMPLOI
SPECULUM MONOUSO - ISTRUZIONI PER L'USO
ESPÉCULO DESCARTÁVEL - INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR



B[®] BIONIX[®]
+1 419 727 8997
www.Bionix.com

©2016 Bionix Development Corp.
Rev. 12/5/2016 • RM95-XXXX • Patented



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM • Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net



Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd.
Toledo, OH, 43612 • U.S.A. • Phone: 800-551-7096
Fax: 800-455-5678 • www.Bionix.com